


XL

Sprängskiss / Exploded view

art. nr. 290EXL-exploded Utg. / Issue 07/15

Bild / picture nr. 1

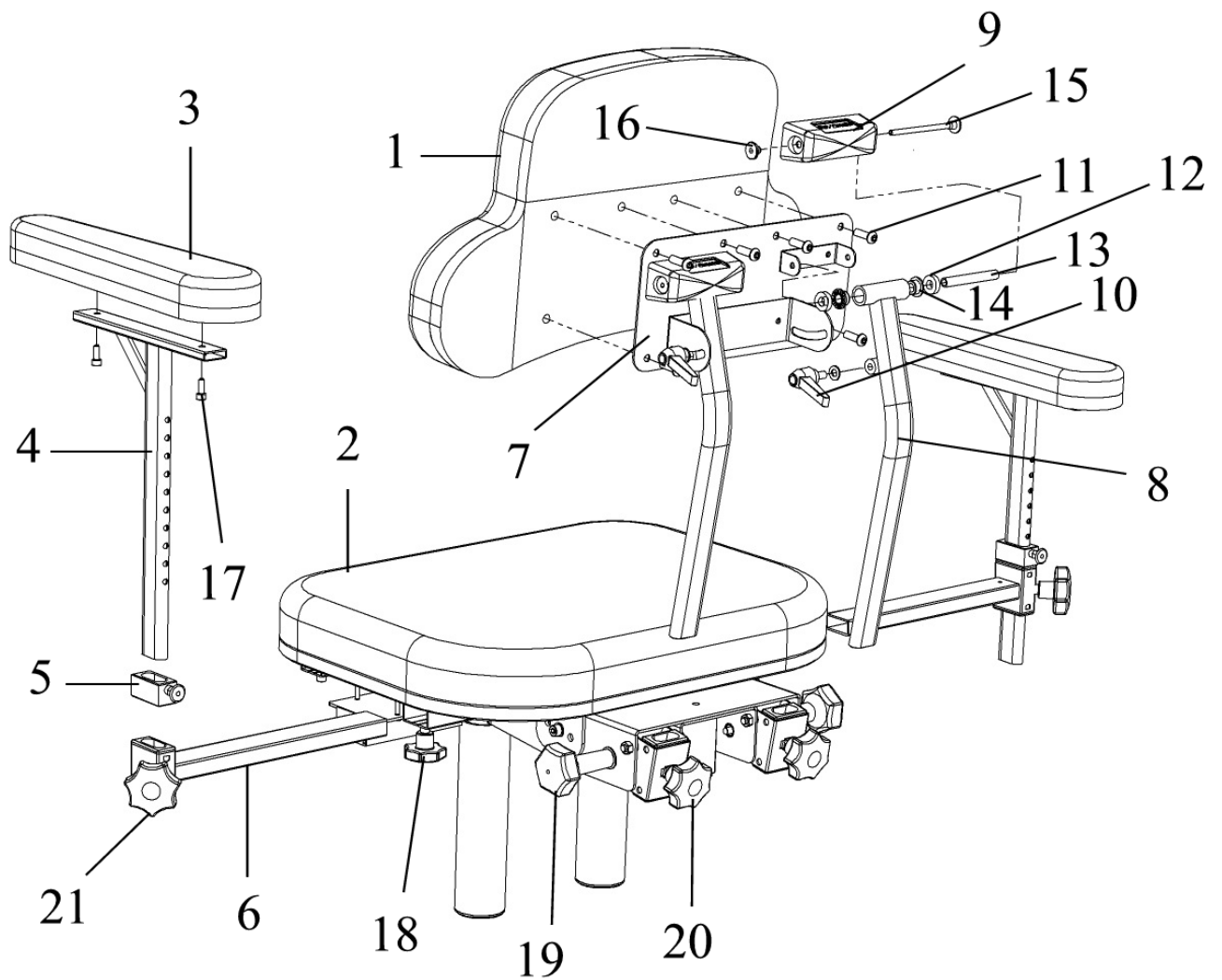


[Skriv text]

		290 EXL	290 EXL	Bild / Pic. nr. 1
Pos. Fig.	Art.nr Part.nr	Benämning	Description	Anmärkning Notes
1	234111-6000	Rygg HD Grå Video 55x35	Back HD Gray video 55x35	
2	234511-3000	Sits Grå Video HD 60x45	Seat Gray Video HD 60x45	
3	624011-4004	Armstödsplatta mjuk EXL	Armrest soft EXL	2 st / 2p
4	400111	Armst. Höjdjustering HD	Armrest hightadj.	2 st / 2p
5	300969	Armst. höjdjust. säk. stopp HD	Armrest. hight. secure. stop	2st / 2p
6	SW-00044	Breddjustering HD	Width adjust. HD	2st / 2p
7	SW-00055	Fäste dubbelrygg	Hold dubble back	
8	624201-6000	Ryggstolpe stor	Back rod big	2st / 2p
9	624101-6100	Plastkåpa rygg	Plastic cover	2st / 2p
10	7WN500-8x16	Låsspak WN500	Locking lever	2st / 2p
11	7MC65-8x20	Insexskruv M8x20	Screw M8x20 allen	6st / 6p
12	624101-6200	Plastbussning	Plastic washer	4st / 4p
13	624101-6060	Distanrör 100x15mm	Distance tube 100x15mm	2st / 2p
14	624101-6300	Gummibussning 20/10x7	Rubber washer 20/10x7	2st / 2p
15	7PINNB-6x10	Pinnbult M6x100	Bolt M6x100	2st / 2p
16	724101-M6	Möbelknapp M6 svart	Nut M6 black	2st / 2p
17	7MC6S-6x20	Insexskruv M6x20	Screw M6x20 allen	4st / 4p
18	7S-RATT-8x12	Skruvratt	Star wheel	2st / 2p
19	7T-RATT-8x90	Skruvratt	Star wheel	2st / 2p
20	7S-RATT-8x12	Skruvratt	Star wheel	2st / 2p
21	7S-RATT-8x12	Skruvratt	Star wheel	2st / 2p

[Skriv text]

Bild / picture nr. 2

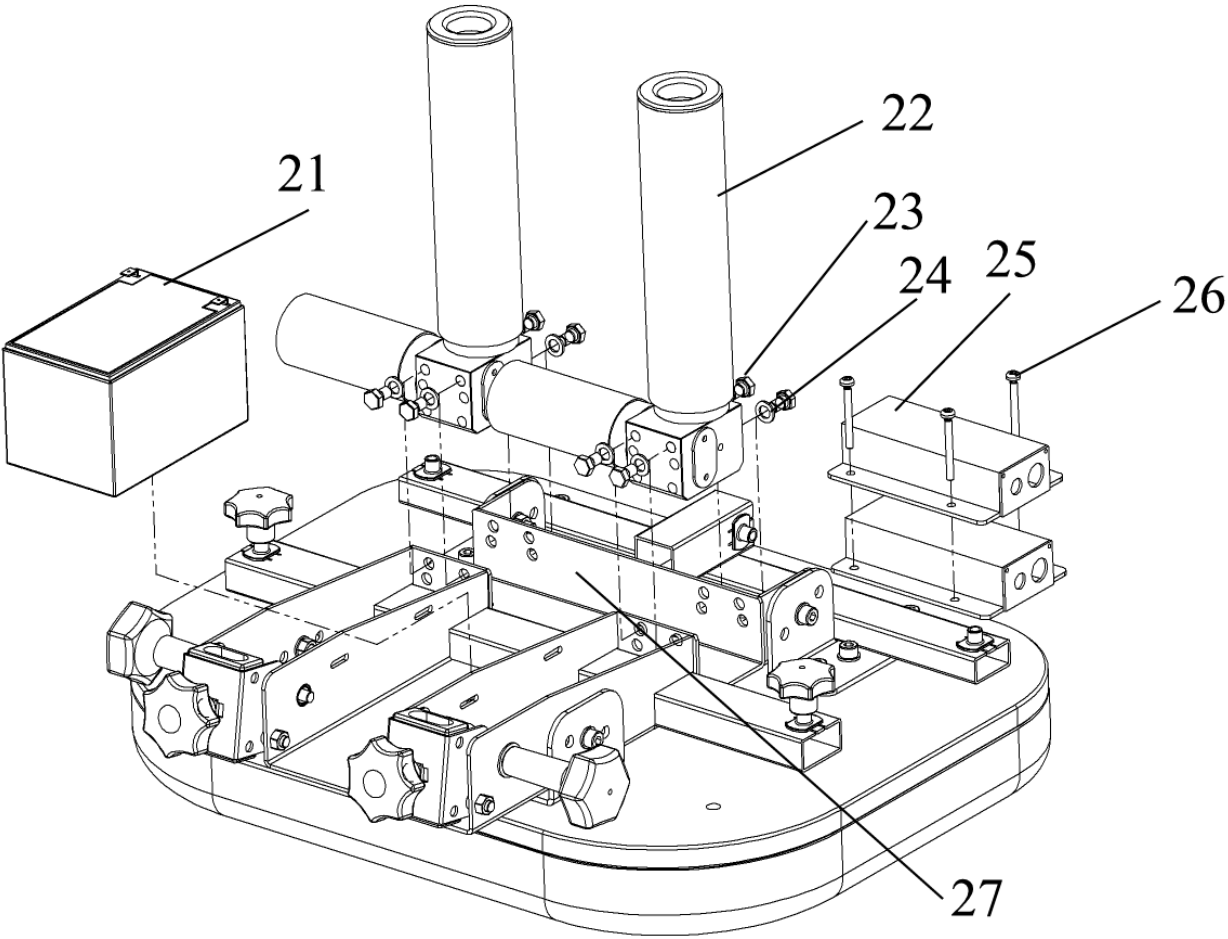


[Skriv text]

		290 EXL	290 EXL	Bild / Pic. nr. 2
Pos. Fig.	Art.nr Part. nr	Benämning	Description	Anmärkning Notes
21	7A512/10	Batteri A512/10s 12V 10A	Battery A512/10s 12V 10A	
22	249101-8000	Ställdon långt2/3/400 Slagl. 250 mm	Actuator long 250 mm	2st / 2p
23	7M6S-8x19	Skruv spec. M8x19	Screw M8x19 special	8st / 8p
24	7BRB-8,4x16	Planbricka 8,4x16x1,5	Washer 8,4x16x1,5	8st / 8p
25	249101-2310	Lyftkort 12V för JEA	Liftcard 12V JEA	2st / 2p
26	7MC6S-6x40	IN-6 skruv M6x40	Screw M6x40 allen	4st / 4p
27	629101-3050	Sittkryss HD	Seatcross HD	


[Skriv text]

Bild / picture nr. 3

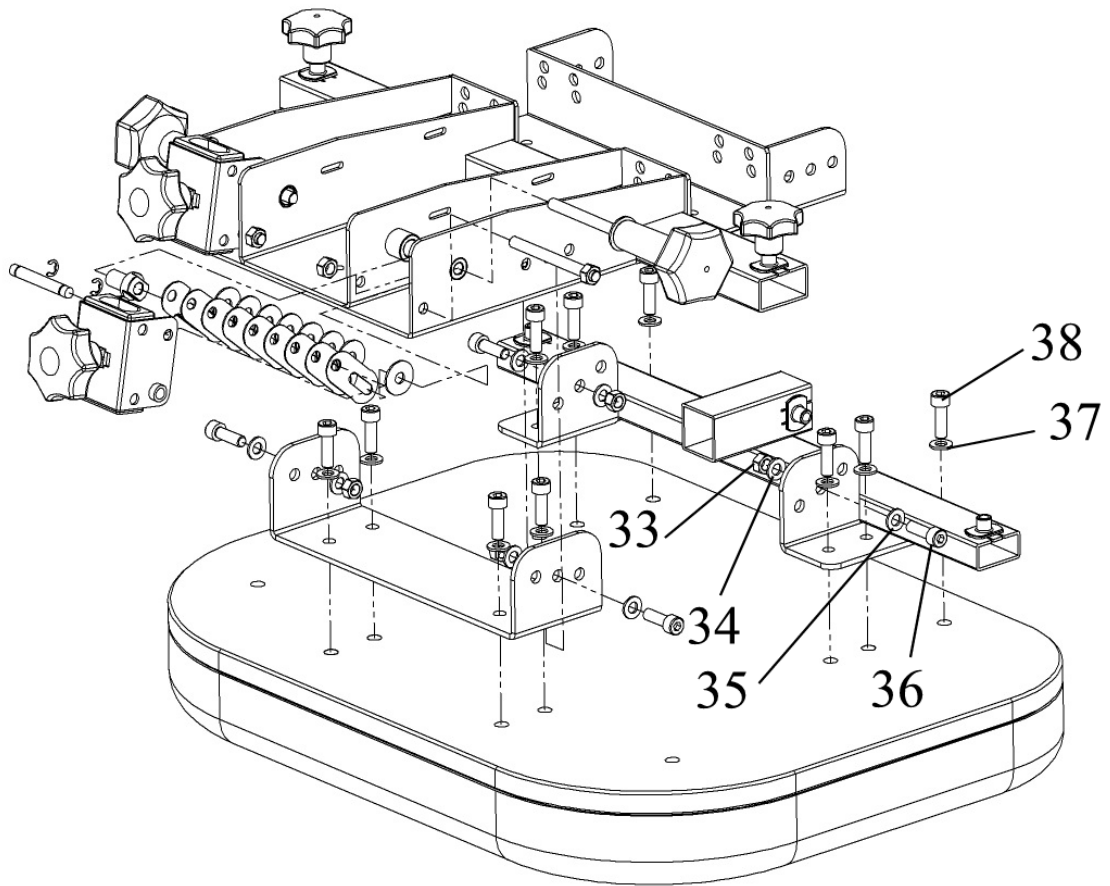

[Skriv text]

Bild / picture nr. 4

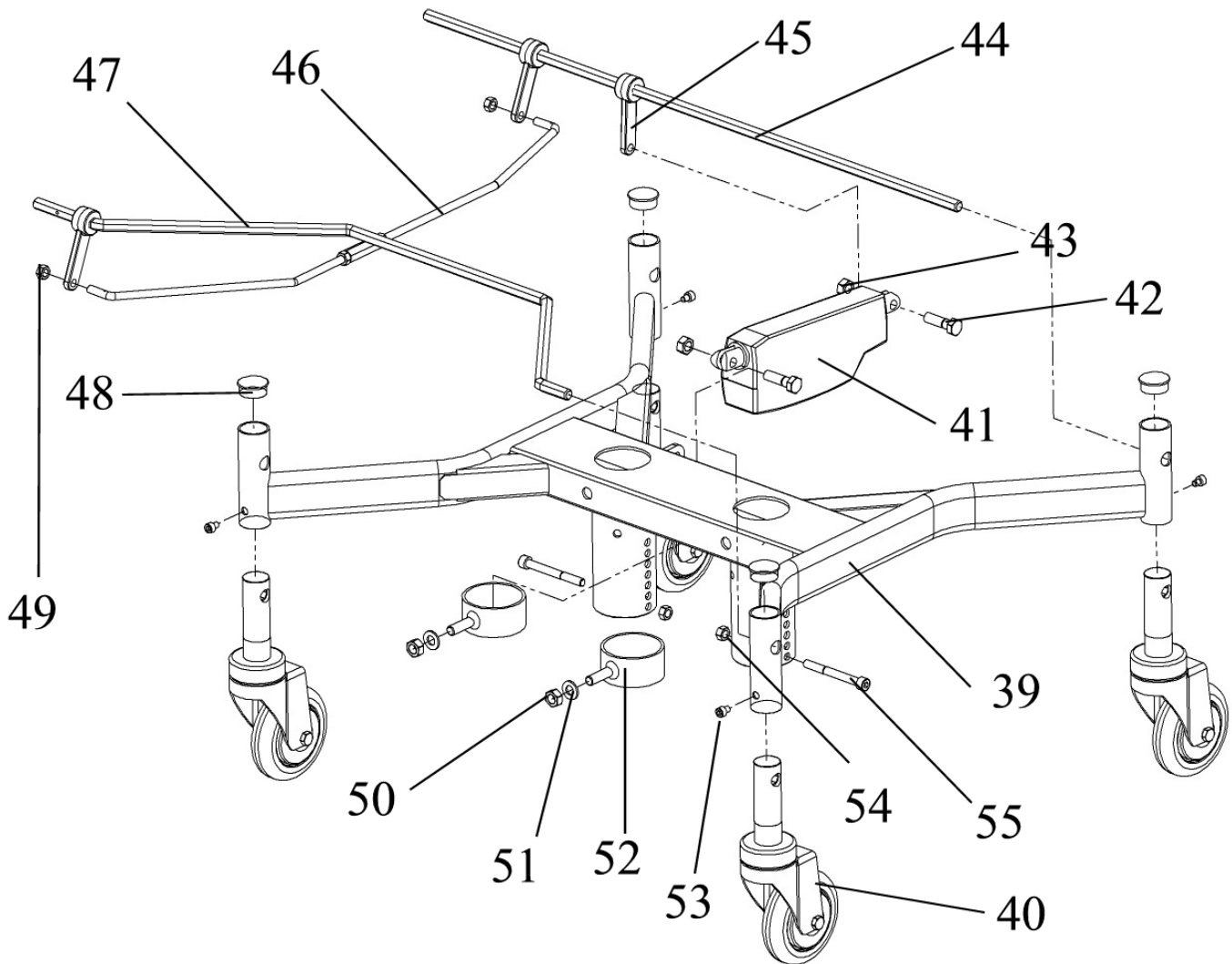

[Skriv text]

		290 EXL	290 EXL	Bild / Pic. nr. 4
Pos. Fig.	Art.nr Part.nr	Benämning	Description	Anmärkning Notes
39	SW-00046	Underrede HD	Under carriage HD	
40	724005-2100-S	Centrallåstb. Sv. m mörkgrå hjul 100	wheel dark gray 100	4st / 4p
41	7LA12 1-40	Ställdon La12 1 040 12V 01 1	Actuator La12	
42	7M6M-10x38 spec	Skruv M10x38 spec JEA	Screw M10x38 special	
43	7KL-10	Låsmutter M10	Nut M10	
44	SW-00049	Sexkantstång Bak HD	Hex. Rod back HD	
45	7SCHALBEL	Bromsarm	Brake arm	
46a	SW-00051	Bromslänk bak	Brake rod, back	
46b	SW-00052	Bromslänk främre	Brake rod, front	
47	SW-00048	Sexkantstång HD vinklad	Hex. Rod HD angle	
48	7SFL-32	Plastplugg	Plastic cover	
49	7KL-8	Låsmutter M8	Nut M8	
50	7KL-10	Låsmutter M10	Nut M10	
51	7BRB-10,5x20	Planbricka 10,5x20x2	Washer 10,5x20x2	
52	649101-1000	Låsrör Alu El	Tube Alu El.	
53	7MC6S-6x10	Skruv M6x10 insex	Screw M6x10 allen	
54	7KL-8	Låsmutter M8	Nut M8	
55	7MC65-8x70	IN-6 skruv M8x70	Screw M8x70 allen	