

svensk  
bruksanvisning

---

**ALVEMA**  
**HOPLA**



CE

**Eurovema**  
Creates mobility and ergonomics.

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	S.
Inledning	3
Kontakt	3
Säkerhetsföreskrifter	3
Att montera Hopla	4
Tillbehör	5-7
Skötsel	8
Tekniska data	9

## INLEDNING

Tack för att ni har valt HOPLA från Alvema. HOPLA är ett gåhjälpmedel för barn med rörelsehinder och konstruerad för att användas inomhus. Vi hoppas att den ska vara till nytta och nöje för alla. Vi ber er följa bruksanvisningen noga för att på bästa sätt kunna hantera er nya produkt.

svenska

## KONTAKT

Har ni frågor eller behöver hjälp med er produkt kontaktas i första hand den lokala leverantören (Hjälpmedelscentral). För att komma i kontakt med tillverkaren se info nedan:

Eurovema AB  
Tel:+46-371-390100  
Fax: +46-371-189 82  
E-mail: [info@eurovema.se](mailto:info@eurovema.se)  
Baldersvägen 38  
332 35 GISLAVED  
SWEDEN  
Web: [www.eurovema.se](http://www.eurovema.se)

svenska

## SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Läs igenom bruksanvisningen noga innan vagnen tas i bruk.
- Lämna aldrig barnet utan uppsikt i stolen.
- Kontrollera regelbundet att alla vred och rattar är ordentligt åtdragna

## ATT MONTERA HOPLA

Hjulgafflarna monteras med justeringsnyckeln på lämplig höjd. (fig 1) De krökta bågarna ska bukta utåt. OBS! Bågarna fram och bak måste månteras på samma höjd för jämn belastning på hjulen. drag inte ut längre än till den röda markeringen. Bållringens stolpe monteras enligt bilden. (fig 2) Fixera med låsratten. Hopla är nu monterad till sitt standardutförande.

1



2



## TILLBEHÖR


### Handbåge

Handbågen ger barnet en mer upprätt hållning och styrförmåga i Hopla. Fästplatta fästes i båringsstolpen. (fig 3) OBS! Den lilla skruven måste lossas först. Vinklingen regleras med vredet på vänster sida. (fig 4)


### Sadel

Trä sadeln på det horisontella röret, fäst med stoppskruven. (fig 5) Placera fäströret i profilen. Välj lämplig höjd. Drag åt ratten (fig 6)

3

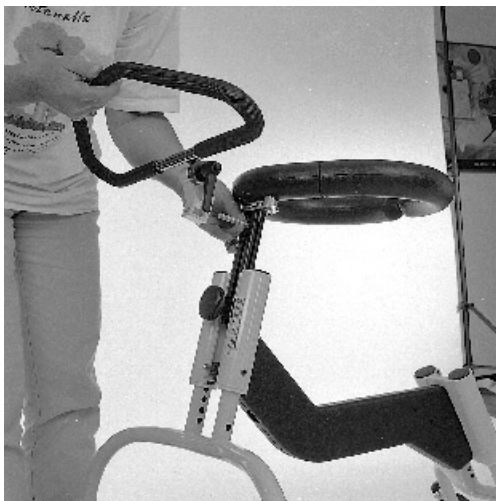

4

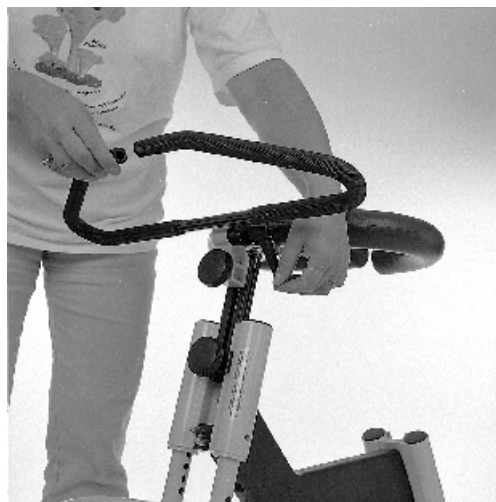

5



6



## TILLBEHÖR


### Höftstöd

Fästsruven träs in i bakre profilen **över** sadelfästet. (fig 7). Ställ in lämplig höjd, drag åt ratten. Höftstödet vinklas med vredet på höger sida. (fig 8)


### Magstöd

Magstödet placeras i hålet på rörets framkant. Vinkling och djup ställs in med vredet på höger sida. (fig 9)


7

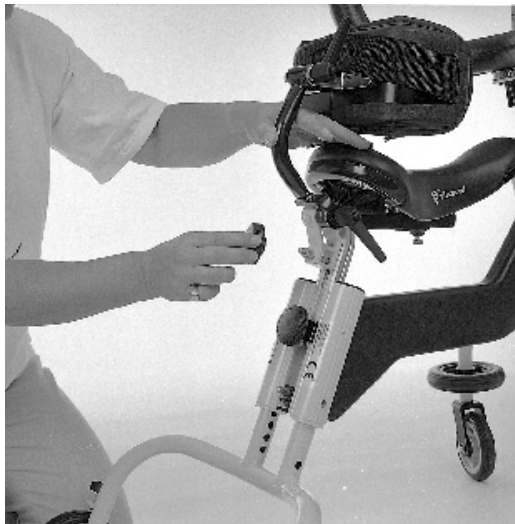

8

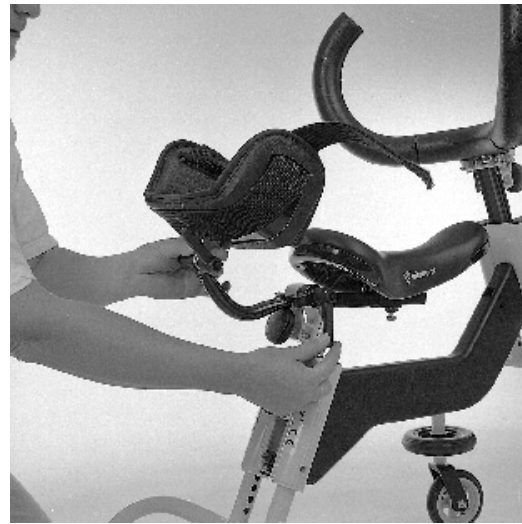

9

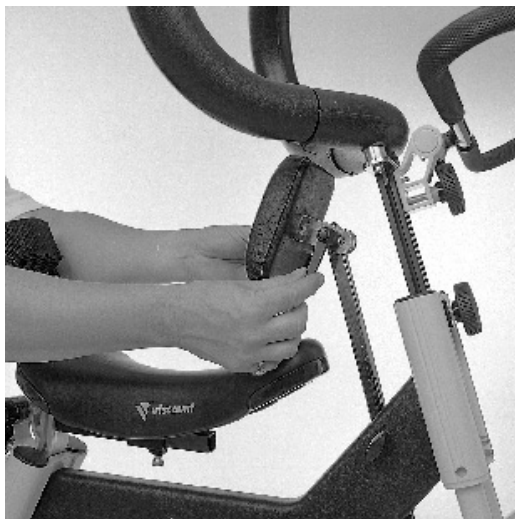




## TILLBEHÖR

### Bandelare


Fäströren skruvas in i hålen på undersidan av ramen. (fig 10) Plastskivan träs på med den runda sidan framåt och fästskruvarna dras åt med insexnyckel.(fig 11)

### Påskjutshandtag

Skruren lossas helt. Fästet placeras runt bakre ramen. (fig 12). Skruven drages åt hårt.

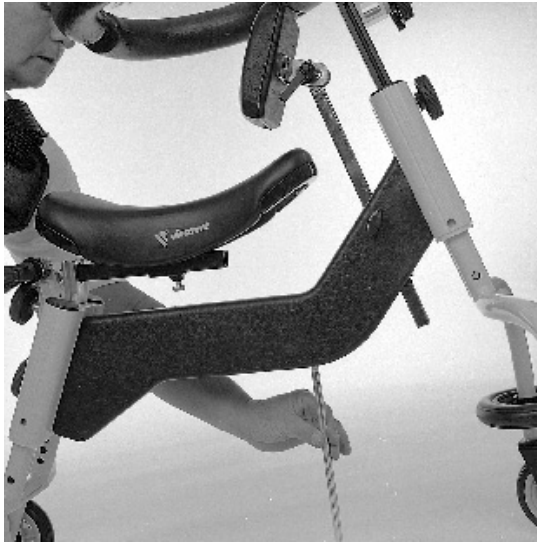

10

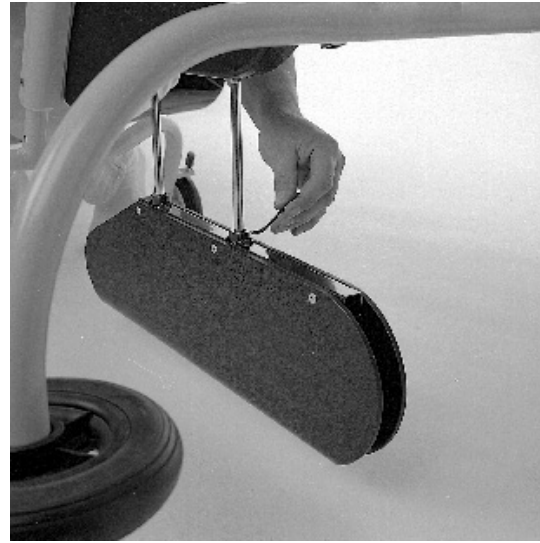

11



12

## SKÖTSEL

Vi rekommenderar en översyn 2ggr / år av behörig teknisk personal

Endast originalreservdelar från Eurovema får användas

Kontrollera regelbundet att alla rattar och vred är ordentligt åtdragna

Ramen tvättas med en trasa och bilschampa / polish.

Produkten kan rengöras med ytdesinfektionsmedel.

Gåstolen bör klara 60 grader maskintvätt och 6 minuters högtryckstvätt/diskmaskin/ångtvätt av den typen som förekommer i hjälpmedelshandlingen.



## TEKNISKA DATA

Storlek	small	large
Sitthöjd	26-35 cm	36-45 cm
Sitthöjd, sadel	35-52 cm	45-62 cm
Bårring, diameter	25,5 cm	25,5 cm
Bårring, höjd till golv	54-63 cm	66-83 cm
Längd, total	86 cm	96 cm
Bredd, total	69 cm	76 cm
Hjul, diameter	13 cm	13 cm
Brukarvikt, max	35 kg	35 kg
Brukarlängd, max	110 cm	135 cm
Vikt	9,2 kg	9,6 kg

## Material

Vid tillverkning har enast giftfri färg och pulverlack använts. Alla tyger är flamsäkra. Stål och aluminium används till alla rör. Dynorna är tvättbara i maskin och märkta med skötselinstruktioner.



***Euro*vema**  
Creates mobility and ergonomics