


VIKTIGT SÄKERHETSMEDELAND PIXI SULKYVAGN

1 juni 2015

Bästa användare av Pixi sulkyvagn.

Vi har noterat att det finns en liten risk att handtagsleden kan gå sönder om man inte följer de anvisningar som vi anger i manualen. Detta är ett förtydligande hur du skall utföra en säker hantering vid lyft eller trappkörning. Nya manualen är uppdaterad enligt denna instruktion.

- OBS! Vid trappkörning och lyft skall handtaget fällas ned. Greppa chassit innanför/på handtagsleden för säker hantering av vagn och barn.

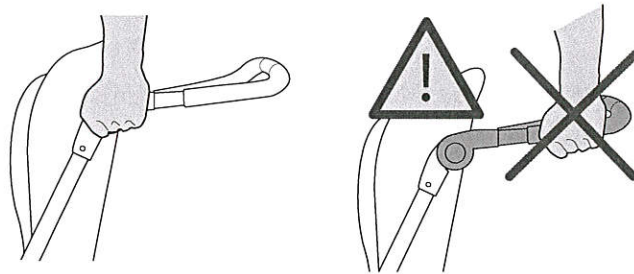

Detta meddelande ska vidarebefordras till alla berörda inom din organisation, eller till annan organisation som har tagit emot denna produkt som kan utgöra en risk. Om du fått detta meddelande hem till dig så har det skett i nära samarbete med din vårdgivare. Dina personuppgifter hanteras med sekretess och kommer inte att användas till något annat och kommer heller inte att sparas av Eurovema.

Undertecknad bekräftar härmed att detta meddelande har rapporterats till berörd regulatorisk myndighet.



Stefan Helgebring
Teknisk chef
Eurovema AB
Baldersvägen 38
SE-332 35 Gislaved
Tel. 0371 390 100

