

# Eurovema

Creates mobility and ergonomics.

## monteringsanvisning / assembly instruction

### armstödsplatta / armrest plate

Art.nr. 624001-4060

Art.nr. 624002-4004

Art.nr. 634001-4000

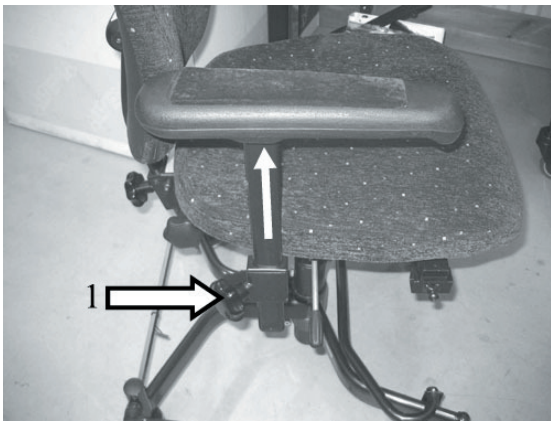
Art.nr. 299101-4001 H / V

Art.nr. 224001-4004

till / to

200 Classic / Comfort

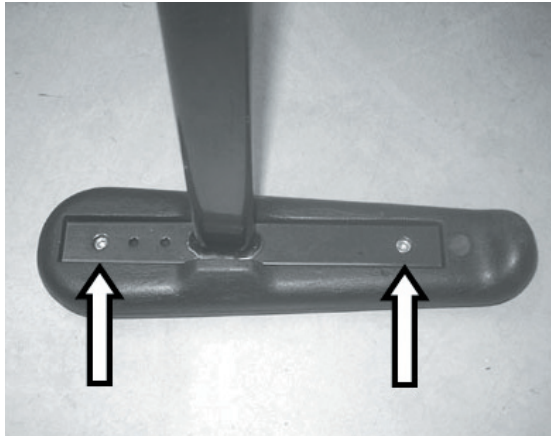


**Sve**

Lossa på vredet (1) och lyft ur armstödet från sitt fäste.

**Eng**

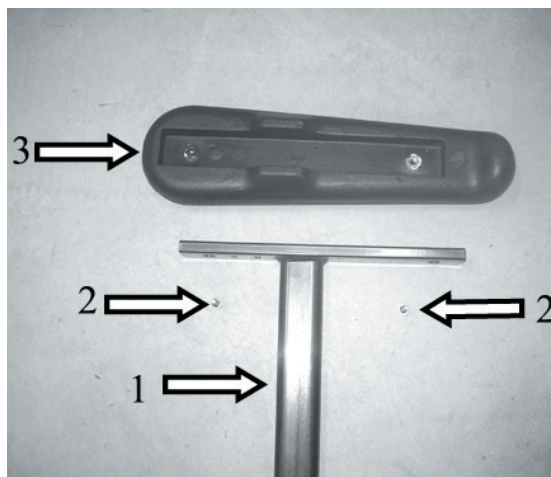
Loosen the wheel (1) and pull the armrest from its hold.

**Sve**

På undersidan av armstödet finns två fästskruvar. Lossa de två skruvarna helt med insexnyckel 5mm och ta bort plattan

**Eng**

Locate the two screws under the armrest. Loosen completely with allen key 5 mm and remove the plate.

**Sve**

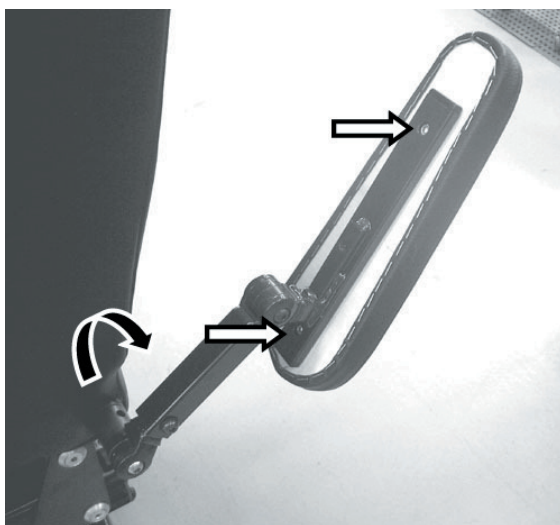
Montera den nya armstödsplattan (3) på armstödsstolpen (1) med två stycken M6x12 skruvar.

Sätt tillbaka armstödsstolpen i sitt fäste på stolen

**Eng**

Mount the new armrestplate (3) on the armrest rod (1) with two M6x12 screws.

Mount the armrest rod in its place on the chair..

**Sve**

På Comfortsitsen fälls armstödet bakåt för att komma åt skruvarna.

**Eng**

On the comfort seat you fold the armrest backwards to get to the screws.