



CLAM modul

Koppling för Dolphin / G90



CLAM kontakt

1 DXB-	2 SIDE LIGHTS-	3 RIGHT IND-	4 LEFT IND-	5 POLAR- ISATION	6 SLOW/STOP OUT	7 SLOW/STOP IN
8 CLAMB-	9 ID	10 ACT1 +	11 ACT2 +	12 ACT3 +	13 ACT4 +	14 ACT5 +
15 DXB+	16 CLAMB+	17 ACT1 -	18 ACT2 -	19 ACT3 -	20 ACT4 -	21 ACT5 -

- Sitslyft, 14 och 21
- Tilt-sitsvinkling, 10 och 17
- Ryggvinkling, 11 och 18
- Höger benstöd, 13 och 20
- Vänster benstöd, 12 och 19

Använd stiftverktyg:
7DX-CRIM9996 Utpetare
7DX-CRIM9997 Inpetare

Halvfartsbegränsning 6 och 7