

MONTERINGS – BRUKSANVISNING

Vårdarstyrning – Z-styrning


Art.nr. 7DX-EF150



Z- styrningen används som vårdarstyrning på Comfortsitsen.


Avsedd att användas tillsammans med manöverbox ACU1, art.nr. 7DX-ACU1.

För att köra framåt trycks handtagen nedåt och för att backa lyfts de uppåt. För att svänga höger förs handtagen åt vänster och tvärtom för att svänga vänster.

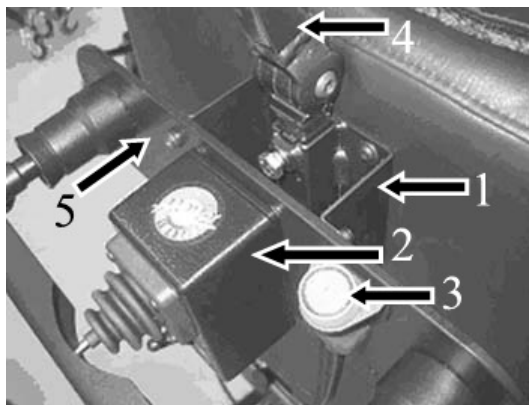

- 1) Kombinerat fäste för nackstöd och z-styrning
- 2) Manöverbox ACU 1
- 3) Nödstopp
- 4) Nackstöd
- 5) Z-styrning

Fästet (1) skruvas fast i de hål som finns bakom klädseln på Comfortryggen.

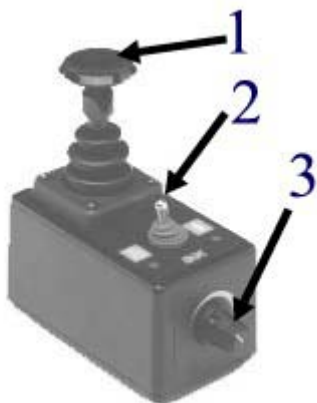


Manöverbox ACU1 som används tillsammans med Z-styrningen. Drag bort knoppen (1) innan den monteras i Z-styrningen. Med spaken (2) väljer man om man ska köra rullstolen med Z-styrningen eller joysticken. Med vredet (3) kan man finjustera med vilket hastighet rullstolen ska framföras med Z-styrningen.

Buskabeln från ACU1 kopplas in på ledig plats i Dynamic elektroniken. T.ex. på G80T:n.

Name	Prof 1	Prof 2	Prof 3	Prof 4	Prof 5	ACU
Forward Speed @ Maximum (%)	24	45	60	80	100	60
Forward Acceleration (%)	40	40	40	40	40	40
Forward Deceleration (%)	50	50	50	50	60	60
Reverse Speed @ Maximum (%)	20	30	30	30	70	50
Reverse Acceleration (%)	40	40	40	40	35	35
Reverse Deceleration (%)	60	70	70	70	70	70
Turning Speed @ Maximum (%)	30	40	45	40	50	40
Turning Acceleration (%)	20	20	20	25	40	40
Turning Deceleration (%)	70	70	70	70	60	60
Damping Point (%)	40	40	40	55	40	40
Min to max decel ratio (%)	20	--	--	--	--	--
Maximum profile number (-)	4	--	--	--	--	--
Wrap Profiles [A]	yes	--	--	--	--	--
Change profile while driving	yes	--	--	--	--	--
Allow non-driving profile	yes	--	--	--	--	--
Sleep Timeout (Min)	5	5	5	5	5	5
Soft-Start Time [A] (mS)	20	20	20	20	0	0
Joystick Source (RJM)	no	no	no	yes	no	no
Joystick Swap Forward/Reverse [A]	no	no	no	no	no	yes
Soft-Start Acceleration [A]	yes	--	--	--	--	--

Koppla upp rullstolen mot Wizard programmet i datorn och ändra parametrarna "Joystick source (RJM)" till "yes" på något av körprogrammen, förslagsvis det snabbaste. Ändra även "Joystick Swap Forward Reverse {A}" till "yes" under "ACU". Parametern "RJM enable" ska också stå på "yes" (syns ej på bilden). Under "ACU" kan körhastigheterna programmeras för Z-styrningen.

Koppling för G80 T

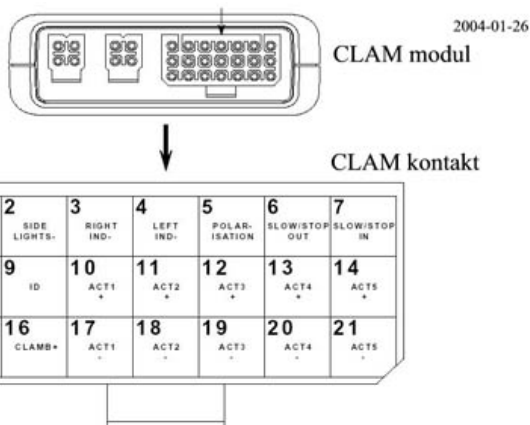

Sladden från nödstoppsknappen kopplas in på plats 6 och 7 på CLAM-modulen. När nödstoppsknappen trycks in stannar stolen omedelbart. För att kunna köra vidare igen måste stolen startas om !

- Sitslyft, 10 och 17
- Tilt-sitsvinkling, 11 och 18
- Ryggvinkling, 12 och 19
- Höger benstöd, 13 och 20
- Vänster benstöd, 14 och 21

Använd stiftverktyg
7DX-CRIM9996 Utpetare
7DX-CRIM9997 Inpetare

Halvfartsbegränsning 6 och 7