


Eurovema

Creates mobility and ergonomics.




Monteringsanvisning

- Coxitsits Classic

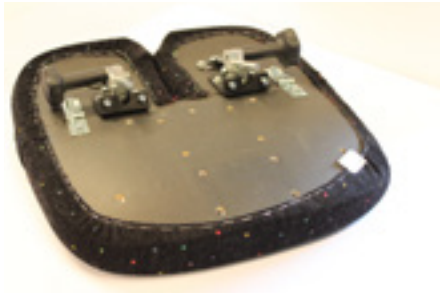

MONTERING OCH INSTÄLLNING AV COXITSITS

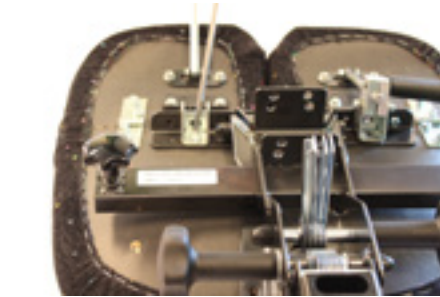


- 1) Tag bort fästet ifrån axeln och skruva dit i sittkrysset med insexnyckel nummer 5.




- 2) Skruva fast gångjärnet med fyra skruvar och fyra muttrar i sittkrysset med en insexnyckel nummer 5 till skruven och en fast nyckel nummer 10 till muttern. Gör samma moment på andra sidan.



- 3) Sätt tillbaka spaken i axeln.

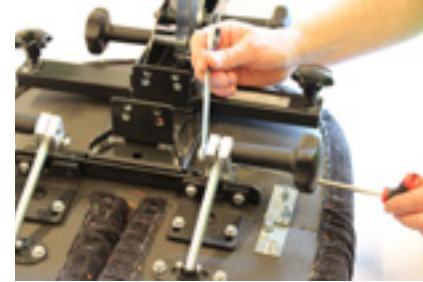


- 4) Skruva dit skruven och muttern i fästet med insexnyckel nummer 5 och fast nyckel nummer 10.

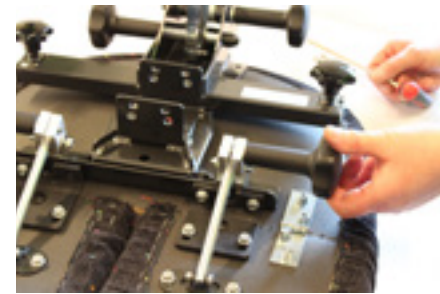

- 5) För att justera vinkeln på coxiten använd spaken.



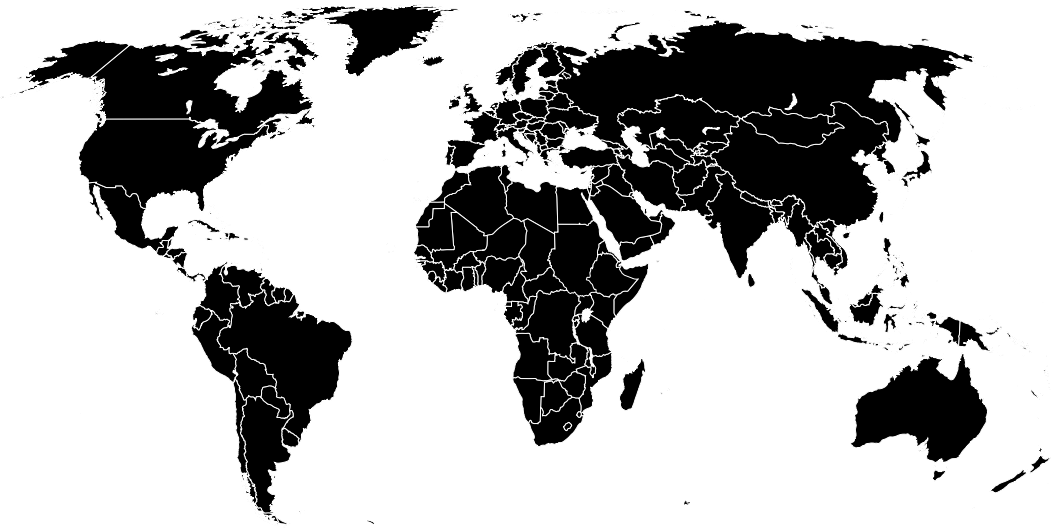

Eurovema

Creates mobility and ergonomics.

Eurovema AB

Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se