


MONTERINGS – BRUKSANVISNING

Amputationsbenstöd

Art.nr. 224001-4100H höger
Art.nr. 224001-4100V vänster

Amputationsbenstödet monteras tillsammans med kombifästet och breddjusteringsfästet

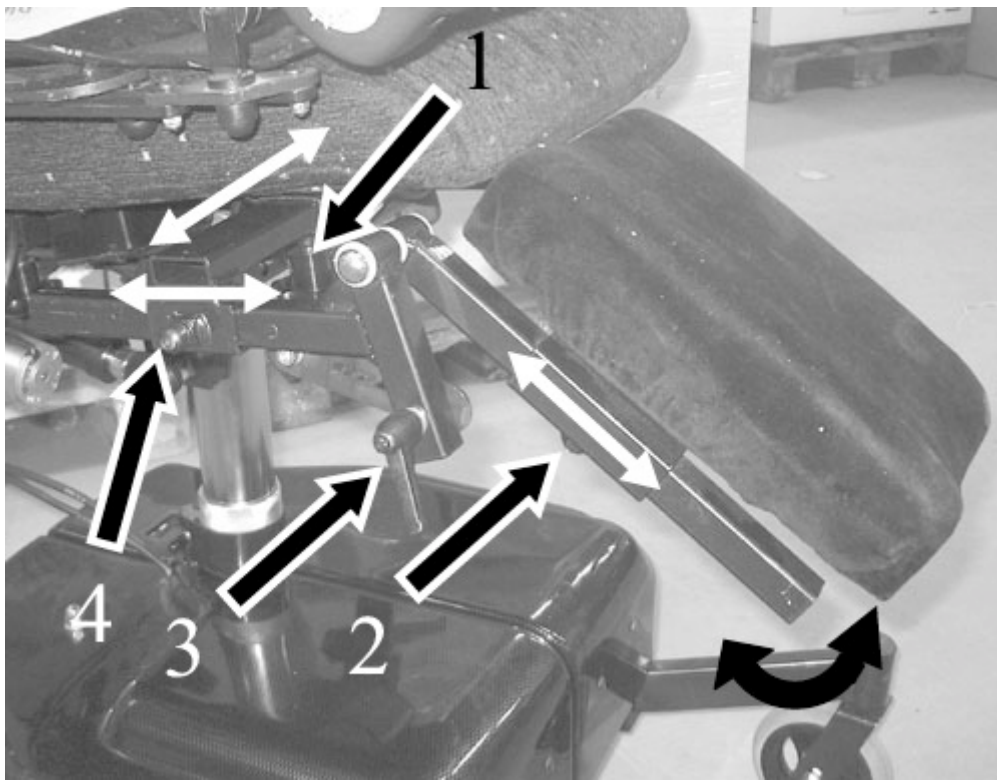

Montera amputationsbenstödet i breddjusteringsfästet. Justera till önskat djup och drag åt med skruven (4). För att justera stödet i sidled lossas vredet (1). Ställ in önskad läge och drag åt vredet. Vinkeln justeras genom att lossa vredet (3). Ställ in önskad vinkel och drag åt vredet. Läget i längdled justeras genom att lossa skruv (2). Ställ in önskat läge och drag åt skruven.