

MONTERINGS – BRUKSANVISNING


Armstöd-fällbart

Art.nr. 269101-4000H


Fällbart armstöd pur+ilägg höger

Art.nr. 269101-4000V

Fällbart armstöd pur+ilägg vänster

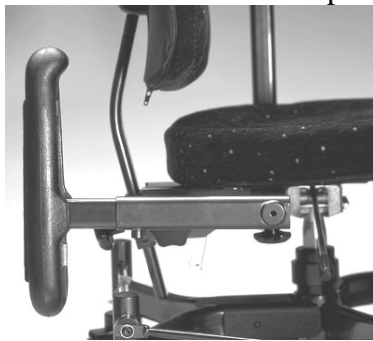


Det fällbara armstödet ger lättare sidoflyttningar till och från stolen och underlättar att komma nära t.ex. ett bord. Monteras i samma fäste som originalarmstödet. Armstödsplattan är monterad på armstödsstolpe art.nr. 669101-4002 som är något kortare än standard, då de fällbara fästet inte är genomgående. Det finns två varianter: med dragknopp eller utan.

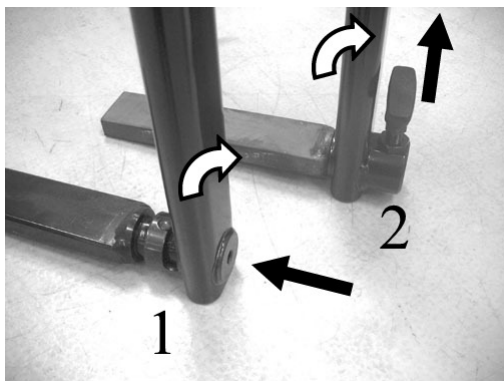

För att fälla armstöd utan dragknopp (1): tryck i pilens riktning och fäll armstödet.

För att fälla armstöd med dragknopp (2): drag i knoppen i pilens riktning och fäll armstödet.

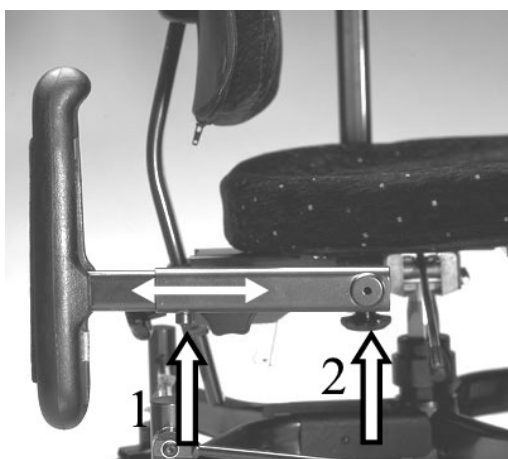

För att justera bredden mellan armstöden lossas vredet (2). Ställ in önskad bredd och drag åt.

För att justera höjden på armstödet lossas skruven (1) med insexnyckel 5mm. Ställ in önskad höjd och drag åt.