

Eurovema

Creates mobility and ergonomics.



Monteringsanvisning

- Benstöd ABC



MONTERING OCH INSTÄLLNING AV BENSTÖD ABC

1) Sätt dit breddjusteringen i sittkrysset.



2) Skruva fast breddjusteringen med en insexnyckel nummer 5.



3) Sätt dit benstödet i breddjusteringen.



4) Skruva åt skruven när benstödet ä i rätt läge (djupet) med insexnyckel nummer 5.



5) För att justera vinkeln på benstödet, lossa på skruven i kugglåset med en insexnyckel nummer 5. När rätt vinkel är inställd skruva åt ordentligt.



6) För att ställa in rätt höjd använd insexnyckel nummer 5 och lossa på skruven och ställ in rätt höjd. Skruva åt ordentligt.



7) För att ändra vinkel på fotplatta lossa på skruven med en insexnyckel nummer 5. När rätt vinkel är inställd skruva åt ordentligt.



8) För att ändra vinkeln i sidled på fotplattan använd insexnyckel nummer 5 och fast nyckel nummer 13.



Eurovema

Creates mobility and ergonomics.

Eurovema AB

Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se