


MONTERINGS – BRUKSANVISNING

Benstödsadapters

ETAC	624001-2104H/V	H=höger V=vänster
Ortopedia	624001-2101H/V	H=höger V=vänster
Quickie	624001-2100H/V	H=höger V=vänster
REA	624001-2102H/V	H=höger V=vänster
Spirea	624001-2105H/V	H=höger V=vänster



Benstödsadapters används när man vill använda manuella benstöd från andra tillverkare på RvS Euroflex rullstolar. De används tillsammans med kombifäste och breddjusteringsfäste.

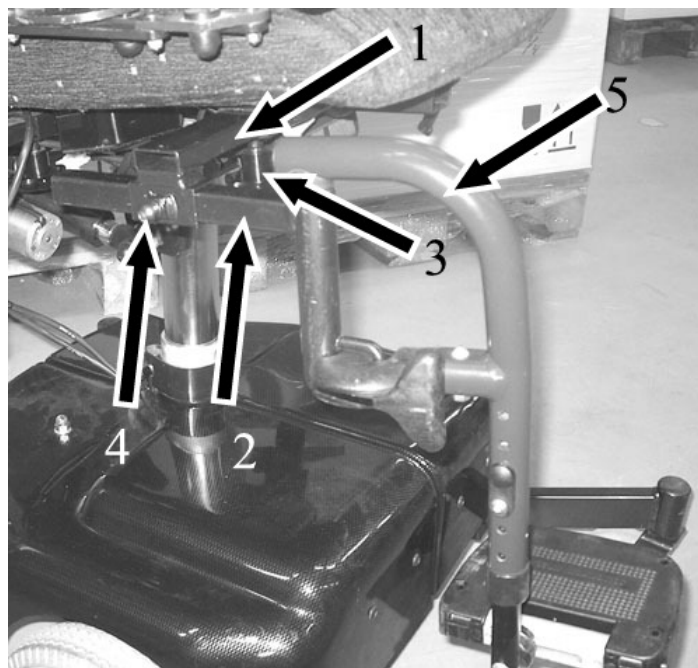

Stoppa in breddjusteringsfästet (1) i kombifästet. Justera in önskad bredd och drag åt ratten (3). Stoppa in adaptern (2) i breddjusteringsfästet. Justera till önskat djup och drag åt skruven (4). Montera sen benstödet, i det här fallet från Spirea.