

MONTERINGS – BRUKSANVISNING

Elbenstöd, delade fotplattor Comfortsits


Art.nr. 299001-8000H/299001-8000V



Delade fotplattor som är elektriskt justerbara i vinkel. Längd, djup och vinkel på fotplatta är manuellt inställbara. .



På sidorna av Comfortsitsen, i framkant på aluminiumprofilen finns det 4st förborrade och gängade hål. I dessa skruvas fästet för elbenstöden fast.

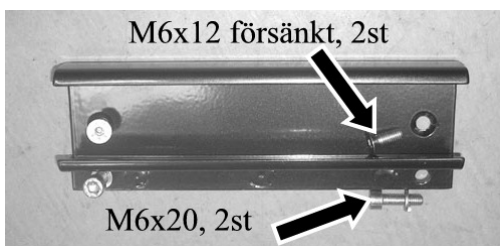


Fäste, art.nr. 699001-8020, med tillhörande skruvar.




Skruva fast fästet i de förborrade hålen.
Verktyg: insexnyckel 4 och 5mm



Skjut in benstödet i fästet.

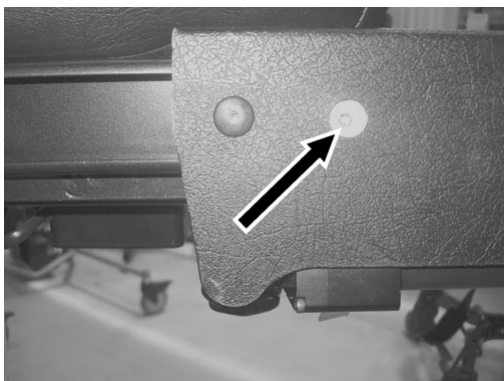


Justera in önskat djup och drag sen fast benstödet med skruven. Se bild.
Verktyg: insexnyckel 5mm

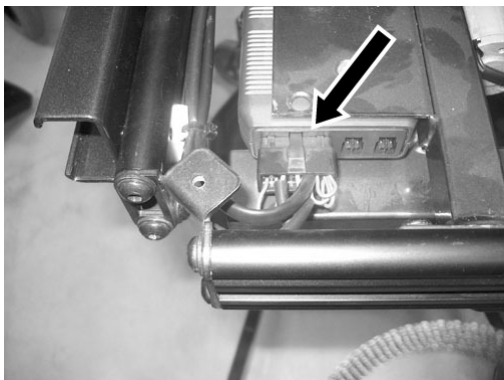

Tag bort sitsdynan och skruva loss plastplattan som sitter fast med 4st skruvar. Insexnyckel 3mm. Kontrollera att kontakten till CLAM- modulen har utgångar för elbenstöd.




Kontakten till CLAM med utgångar för alla fem sitsfunktionerna, sitslyft, tilt, ryggvinkling, vänster benstöd, höger benstöd. Art.nr. 7DX-loom-aux

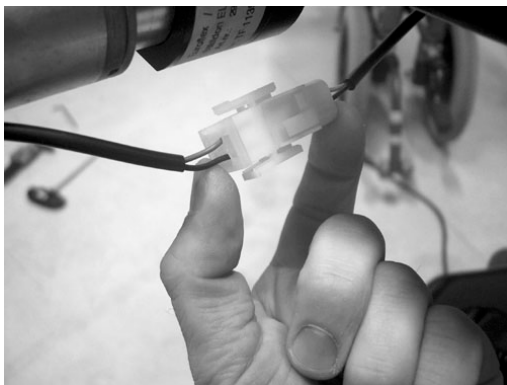

Koppla ihop kabeln från CLAM med kontakten från ställdonet på elbenstödet. Gör likadant på andra benstödet.

CLAM is critical	no
Actuator while driving	no
Actuator 1 Enable	yes
Actuator 2 Enable	yes
Actuator 3 Enable	yes
Actuator 4 Enable	yes
Actuator 5 Enable	yes
Actuator 1 current limit (Amps)	6,1
Actuator 2 current limit (Amps)	4,5
Actuator 3 current limit (Amps)	4,5
Actuator 4 current limit (Amps)	4,5
Actuator 5 current limit (Amps)	4,5
Actuator timeout (Sec)	30

Koppla upp stolen till programmeringsverktyget Wizard och kontrollera att de ställdon (actuator) som önskas användas är ändrade till "yes". Står det "no" går inte ställdonet att använda.

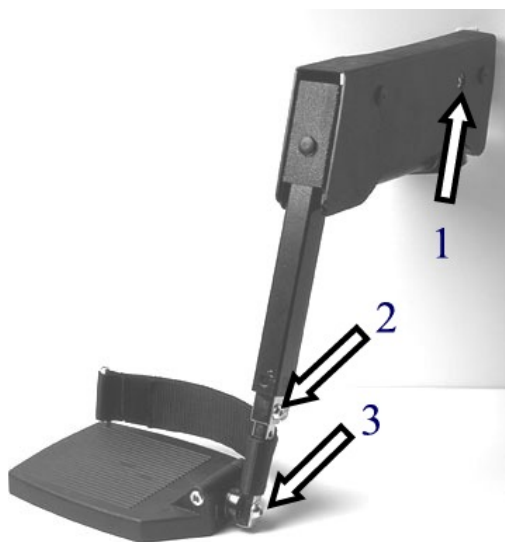


För att justera benstödet i djup så lossas skruv (1). Justera till önskat djup och drag åt skruven.

För att justera benstödet i längd lossas skruven (2) helt och välj något av de förborrade hålen. Skruva tillbaka skruven.

För att justera fotplattans vinkel lossas skruv (3). Ställ in önskad vinkel och drag åt skruven.

Benstödet vinkel justeras elektriskt med manöverboxen.

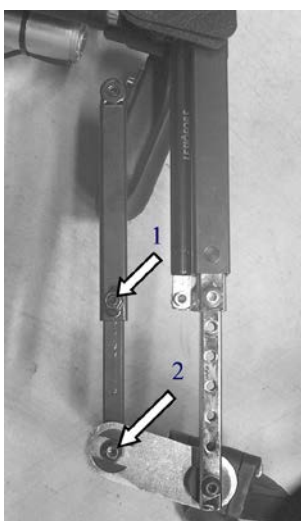

Är elbenstöden utrustade med vadplattor så justeras dessa i höjd genom att lossa skruv(1) och i vinkel med skruv (2). Justera till önskad höjd och vinkel och drag åt skruvarna