

**Eurovema**

Creates mobility and ergonomics.




Monteringsanvisning

- Fotrem

Installation instructions

- Foot strap

## MONTERING AV FOTREMMAR/INSTALLATION FOR FOOT STRAP

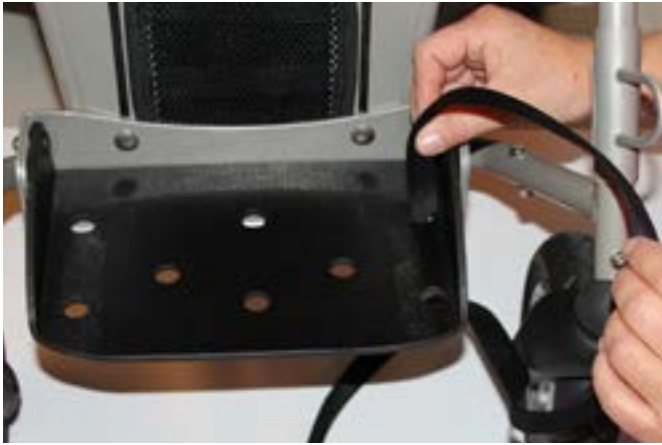

1) Trä remmen i bakre hålet, ovanifrån. / Insert the straps in the rear hole in the foot plate.




2) Trä upp remmen i främre hålet, underifrån. / Insert the straps in the front hole in the foot plate, from below.



3) Trä diagonalt till bakre hålet, ovanifrån. / Insert the straps diagonal in the rear hole in the back.




4) Trä upp remmen i främre hålet, underifrån. / Insert the straps in the front hole in the foot plate, from below.

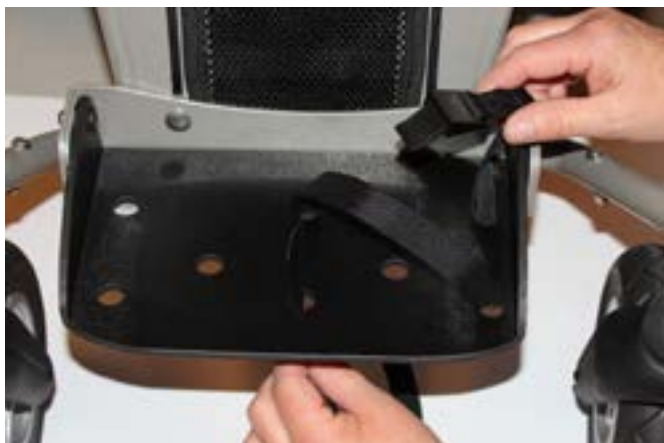


5) Drag upp remmen in det främre hålet. / Tighten up the belt in the front hole.




6) För ihop bakre och främre rem och fäst ihop i spännet. / Slide the rear and front strap and clipped into the buckle.

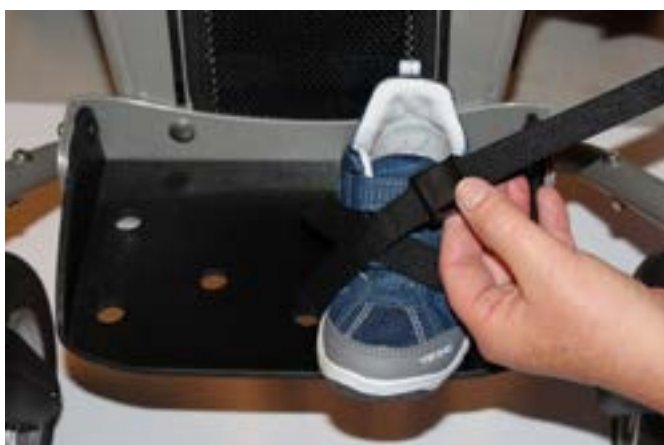

7) Sätt fast den andra remmen i motsatta sidan, sätt dit fötterna och spänn åt lagom. / Slide the second strap to the opposite side, then fit the feet and tighten moderately.

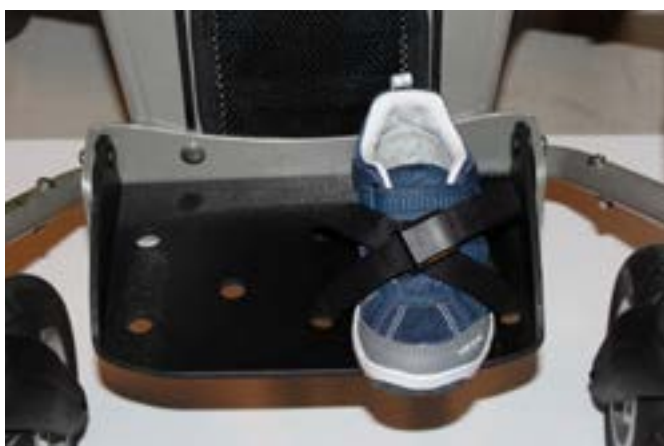

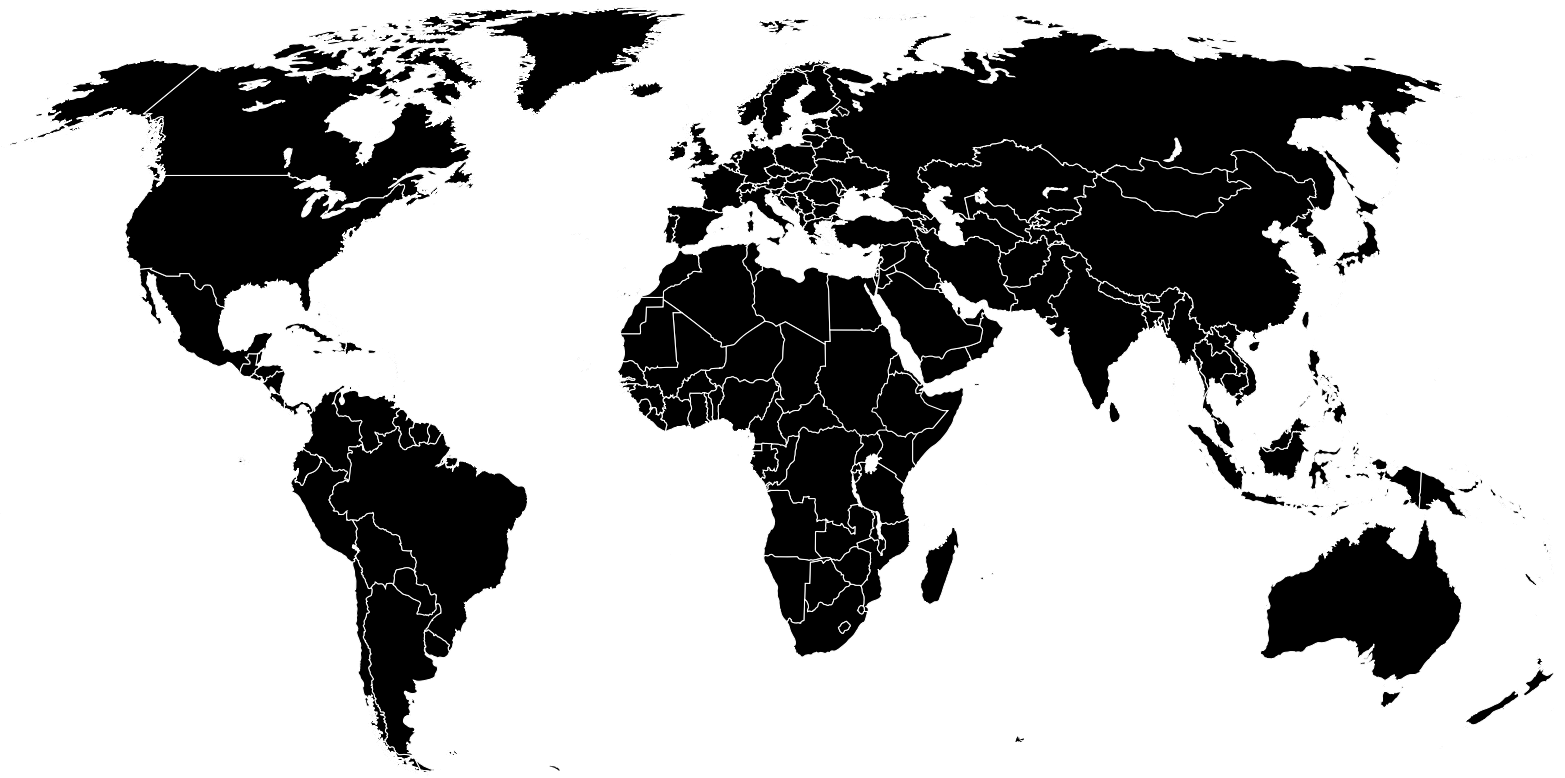

# *Euro*vema

Creates mobility and ergonomics.

Eurovema AB Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden

Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82

info@eurovema.se | www.eurovema.se