

# MONTERINGS – BRUKSANVISNING

## Grenkil

Art.nr. 224047-4800




Används när man vill förhindra att knäna går emot varandra. Kan ge ökad stabilitet och förbättrad sittställning. Tyg: svart skai.  
Monteras i kombination med kombifästet.



Grenkil monterad på standardsitsen.

Kan även monteras på  
Comfortsitsen.

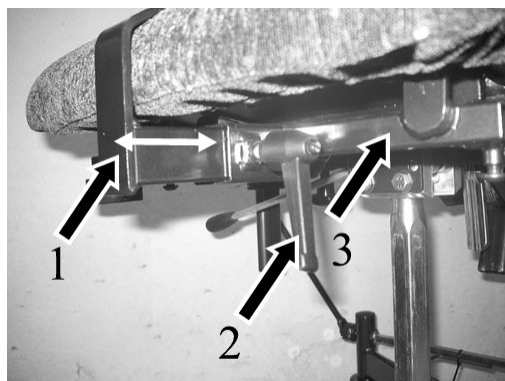

Grenkilen (1) monterad i  
kombifästet (3).

För att justera djupläget på  
grenkilen lossas spaken (2). Ställ  
önskat läge och drag åt spaken.