


## MONTERINGS – BRUKSANVISNING

### Hel fotplatta – vinkelställbar


Art.nr. 224001-2019




Hel fotplatta med vinkelställbarhet i knäled och fotplatta. Används tillsammans med kombifäste art.nr. 224001-2002, 224001-2010, 224001-2110, 224001-2210-F, 299001-2011.

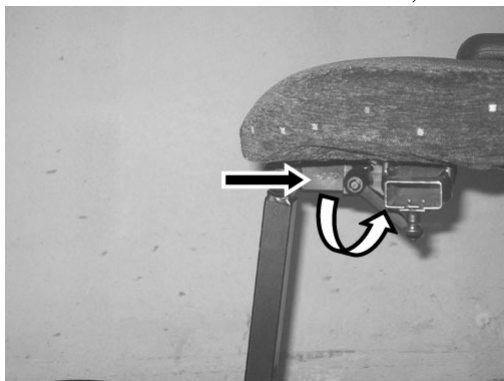

Stoppa in fästet till fotplattan i kombifästet. Justera in önskat djup och drag åt med vredet.

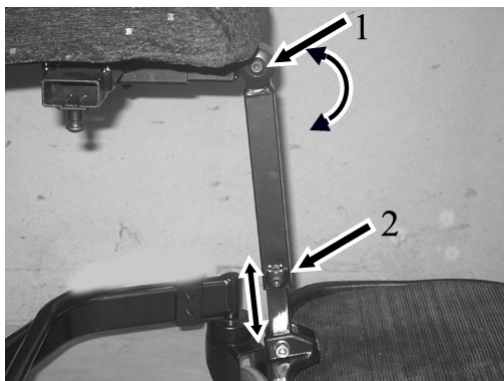

Vinkel på benstödet justeras genom att lossa skruv (1). Ställ in önskad vinkel och drag åt skruven.  
Höjden på fotplattan justeras genom att lossa skruv (2). Ställ in önskad höjd och drag åt skruven.  
Verktyg: insexnyckel 5 mm

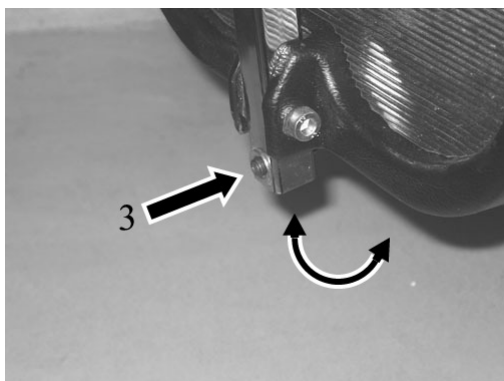

Fotplattans vinkel justeras genom att skruv (3) skruvas medurs för att vinkla plattan uppåt och moturs för att vinkla nedåt. Sluta skruva när önskad vinkel erhållits.  
Verktyg: insexnyckel 4 mm