


MONTERINGS – BRUKSANVISNING

Svankstöd

Art.nr. 299070-4100



Avsedd att ge ett förbättrat stöd i ländryggen i Comfort sitsen. Kan även fungera som ett nackstöd om det används på den höga Comfortryggen.

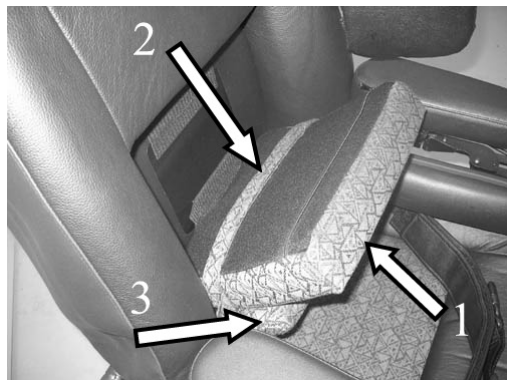

Tag bort iläggsdynan (1) i Comfortryggen och lägg om bandet (2) på svankstödet (3) runt iläggsdynan. Fästes med kardborreband. Sätt tillbaka dynan. För att använda svankstödet som nackstöd på den höga Comfortryggen lossas den övre iläggsdynan och gör på samma sätt som beskrivits ovan.

