


Volaris rollatorer kapning av tippbjäl

Gäller alla modeller tillverkade från och med 2016


Det är tillåtet, vid behov, att kapa av tippbjälpen från en Volaris rollator för att skapa mer utrymme för fötterna.

Eurovema Mobility AB anser inte att denna ombyggnationen medför ökad risk för användaren, när den görs enligt anvisningen nedan. Kapningen av tippbjälpen påverkar inte rollators befintliga CE-märkning.


- 1. Montera av hjulet inklusive hjullagret, bromsoken och skruven som håller fast bakhjulsinfästningen på insidan av rollator.**

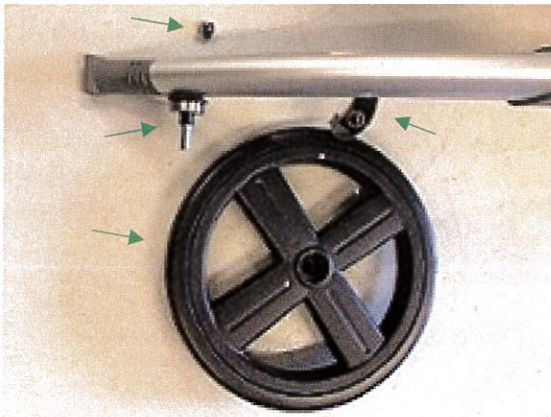

- 2. Dra ut bakhjulsinfästningen. Knacka lätt med plasthammare vid behov.**

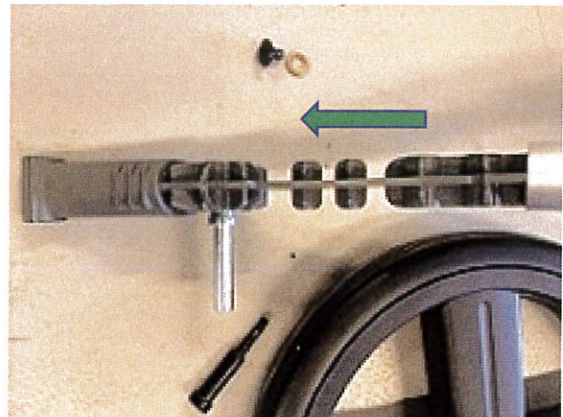

- 3. Såga av tippbjälpen med bågfil innanför innersta räfflan. Lämna kvar ca. 3 mm kant.**

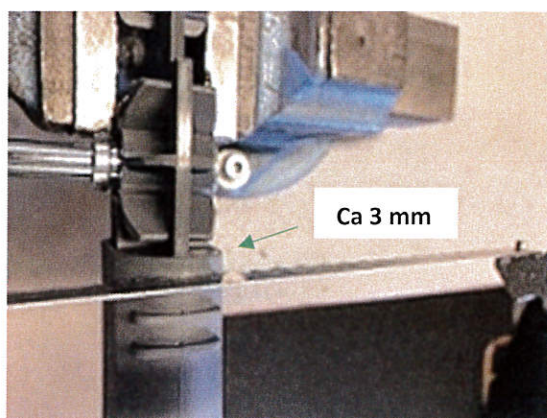

- 4. Montera tillbaka i omvänd ordning. Viktigt! Använd gänglåsning med hög styrka till bakhjulsinfästnings- och hjulskruvar.**

