



# RESERVDELSLISTA serie 700 ABC

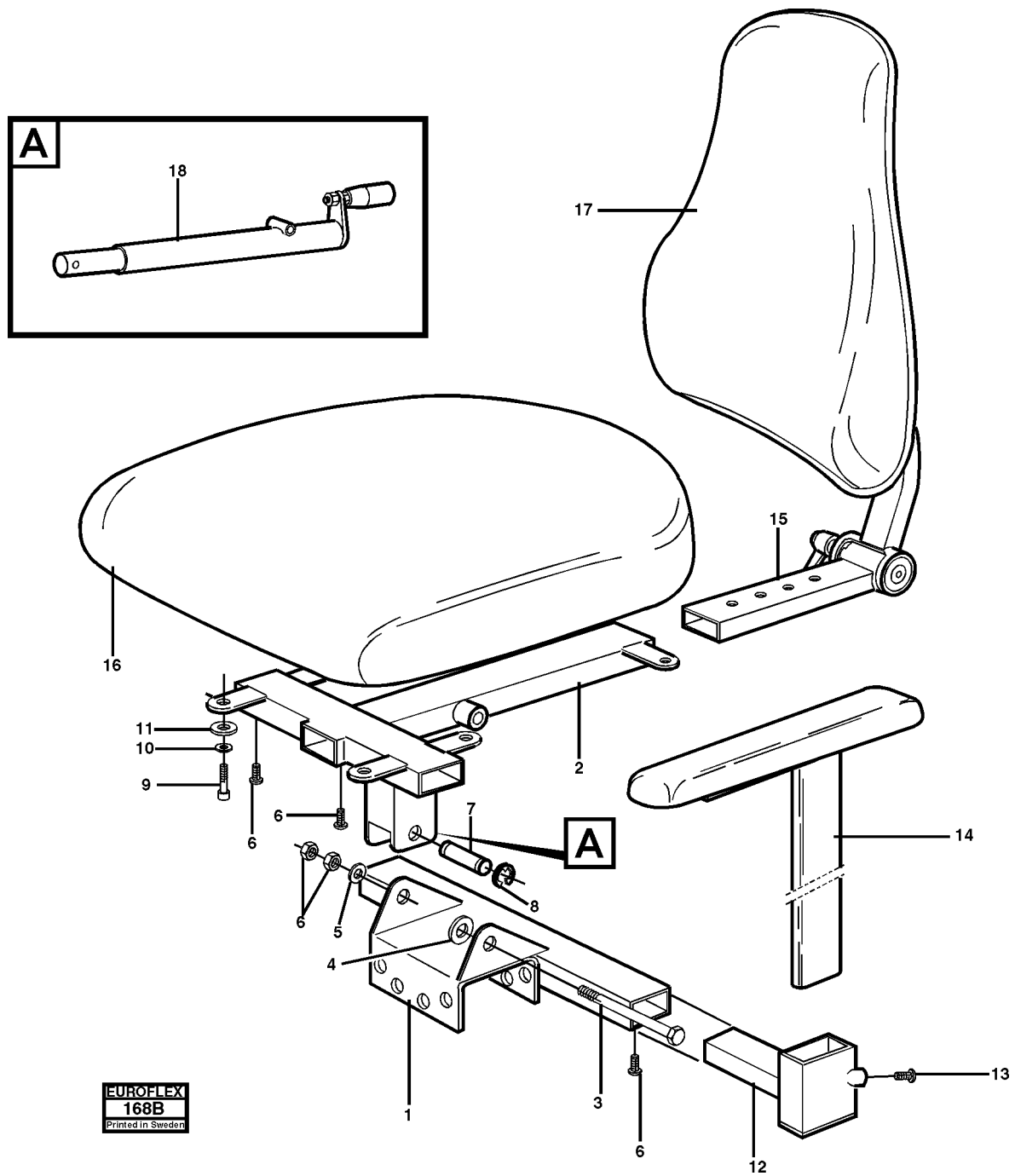



**RESERVDELSLISTA**

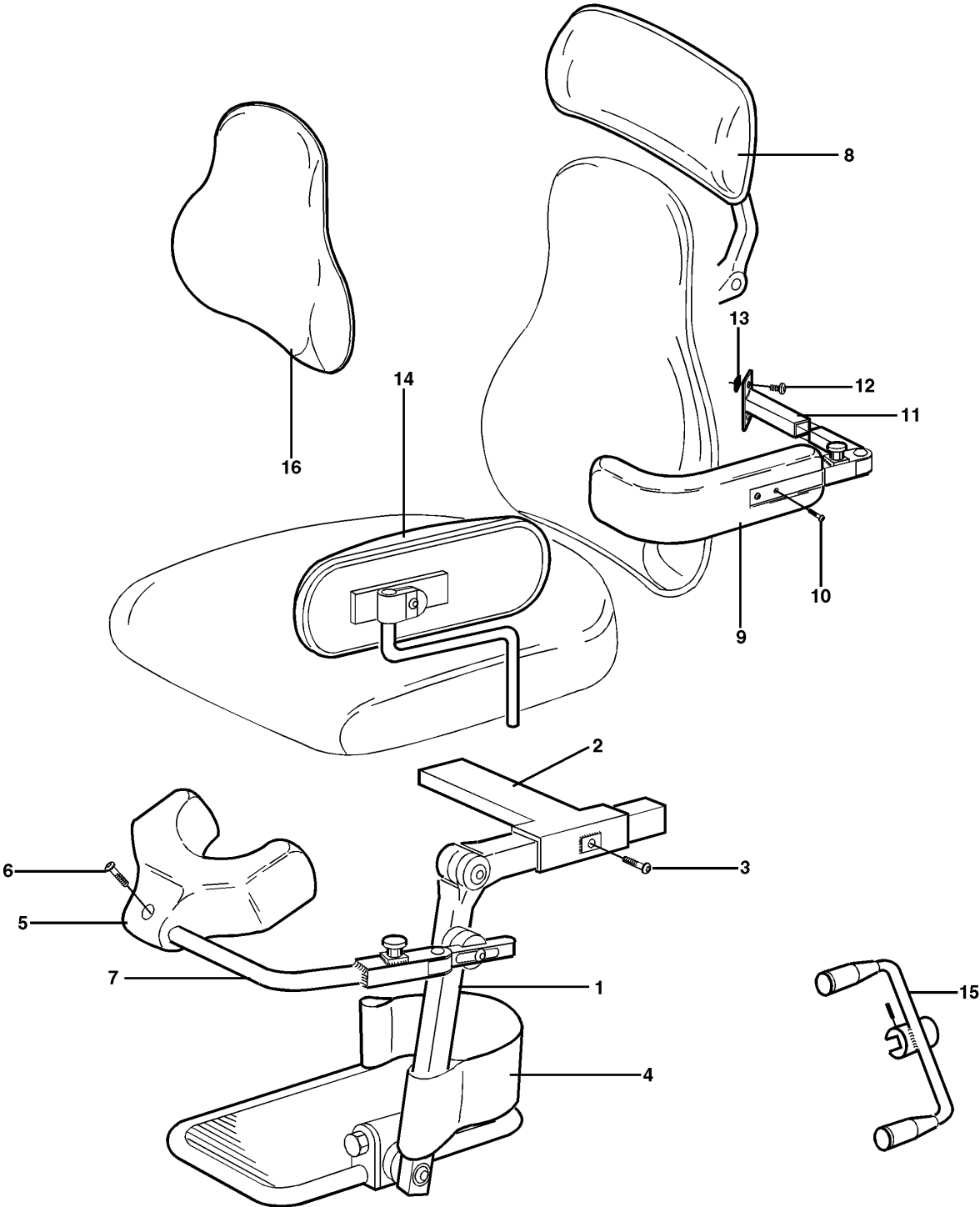

**EUROLEX**  
169  
Printed in Sweden


**Eurovema AB**  
**Baldersvägen 38**  
**332 36 Gislaved**  
**Tel: 0371-39 01 00 Fax. 0371-189 82**






# INNEHÅLLSFÖRTECKNING / INDEX

STÄLLDON, GAS / ACTUATOR, GAS sid 2


STÄLLDON, EL. / ACTUATOR, EL. sid 4

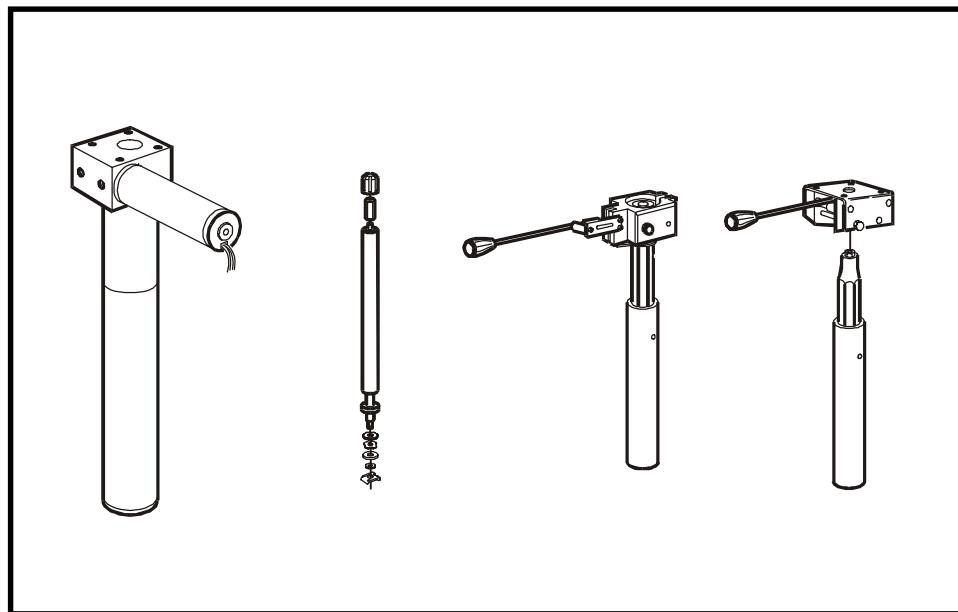

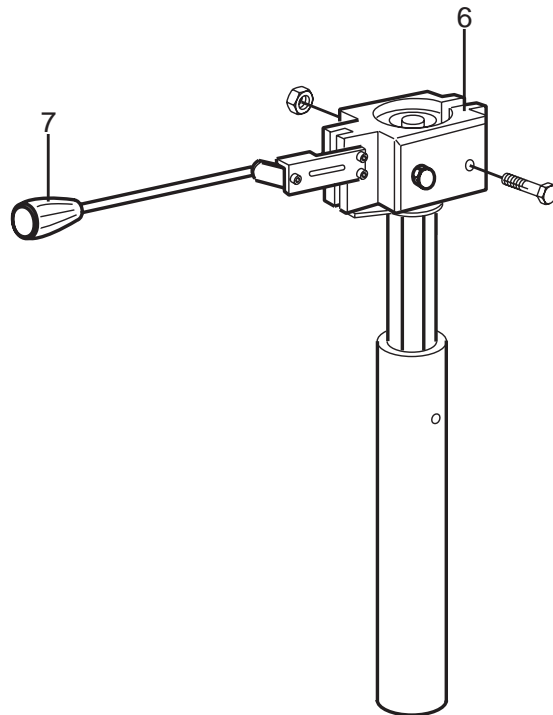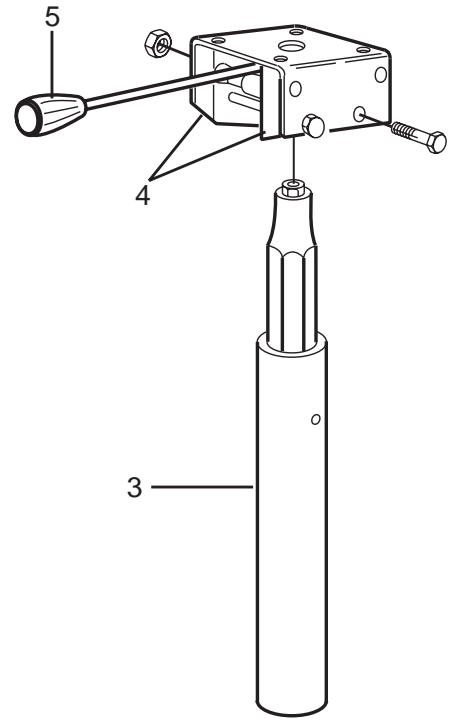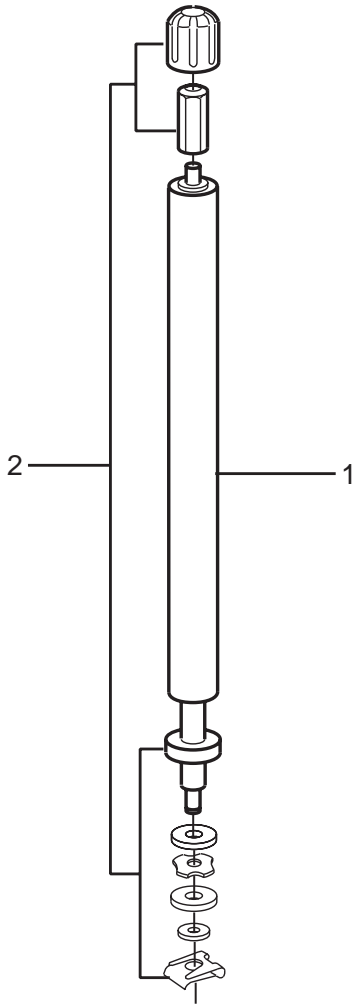

EUROFLEX  
166  
Printed in Sweden

Utgåva Issue		Ställdon	Actuator		
<b>1/98</b>		<b>Gas</b>	<b>Gas</b>		
			Bild Nr Picture No	Grupp Group	Sida Side
			<b>166</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
Pos Fig	Art. Nr Part. No	Benämning	Description	Anmärkning Notes	
1	724002-9350	Gaspatron	Gas spring	350 N	
1	724002-9220	Gaspatron	Gas spring	220 N	
1	724002-9450	Gaspatron	Gas spring	450 N	
2	624001-9005	Monteringssats	Mounting set		
3	224201-9350	Gaskolv	Gas spång lever	350 N	
3	224201-9220	Gaskolv	Gas spång lever	220 N	
3	224201-9450	Gaskolv	Gas spång lever	450 N	
4	624101-9100	Klämbackar	Collet jaw		
5	624101-9200	Gaskolvspak	Gas spring lever		
6	624103-9052	Aluminiumhus	Aluminium housing		
7	624103-9053	Rotationsspak	Rotation lever		

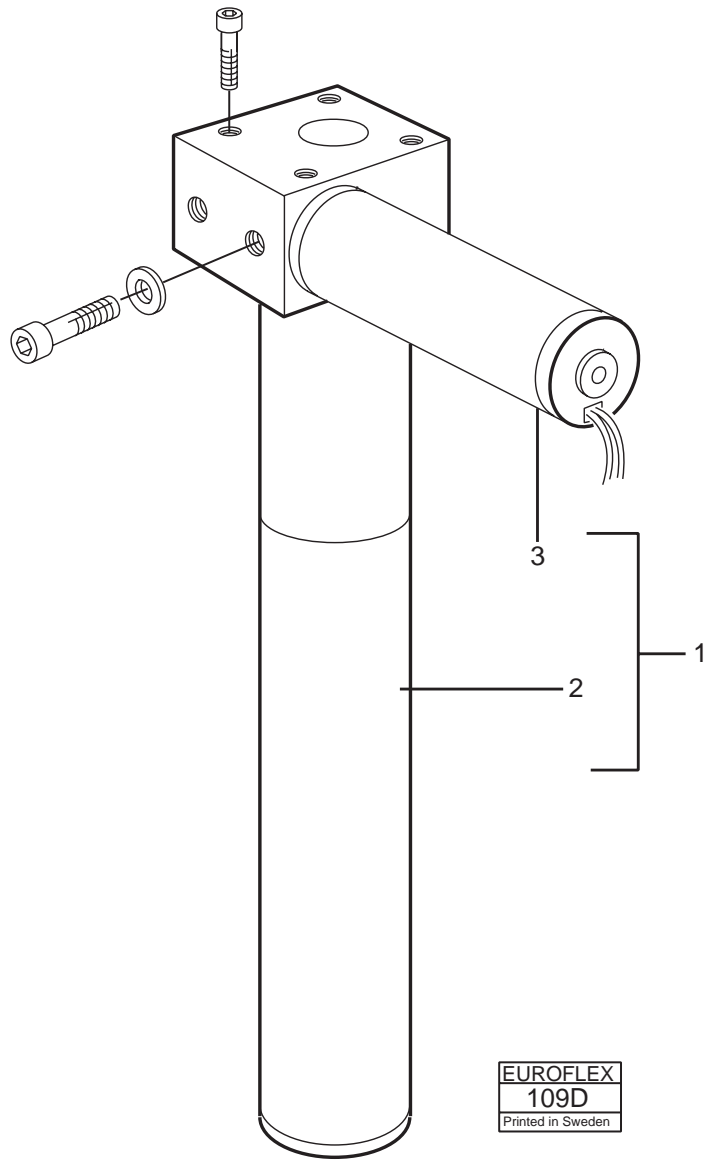


EUROFLEX  
109D  
Printed in Sweden



Utgåva Issue <b>1/98</b>		<b>Ställdon</b>  <b>Elektrisk</b>	<b>Actuator</b>  <b>Electric</b>	Bild Nr Picture No <b>109D</b>	Grupp Group <b>3</b>	Sida Side <b>4</b>
Pos Fig	Art. Nr Part. No	Benämning	Description	Anmärkning Notes		
1	249102-8000	Ställdon, kmpl	Actuator, cmpl	57mm - 180mm slag / blow		
1	249101-8000	Ställdon, kmpl	Actuator, cmpl	57mm - 250mm slag / blow		
1	259102-8000	Ställdon, kmpl	Actuator, cmpl	60mm - 180mm slag / blow		
1	259101-8000	Ställdon, kmpl	Actuator, cmpl	60mm - 250mm slag / blow		
1	249102-8010	Ställdon, kmpl	Actuator, cmpl	Rotation		
2	249102-8001	. Ställdon	. Actuator	57mm - 180mm slag / blow		
2	249101-8001	. Ställdon	. Accutator	57mm - 250mm slag / blow		
2	259102-8001	. Ställdon	. Actuator	60mm - 180mm slag / blow		
2	259101-8001	. Ställdon	. Actuator	60mm - 250mm slag / blow		
3	649101-2814	. Motor	. Motor	12V		
3	649101-2804	. Motor	. Motor	24V		


RESERVDELSLISTA

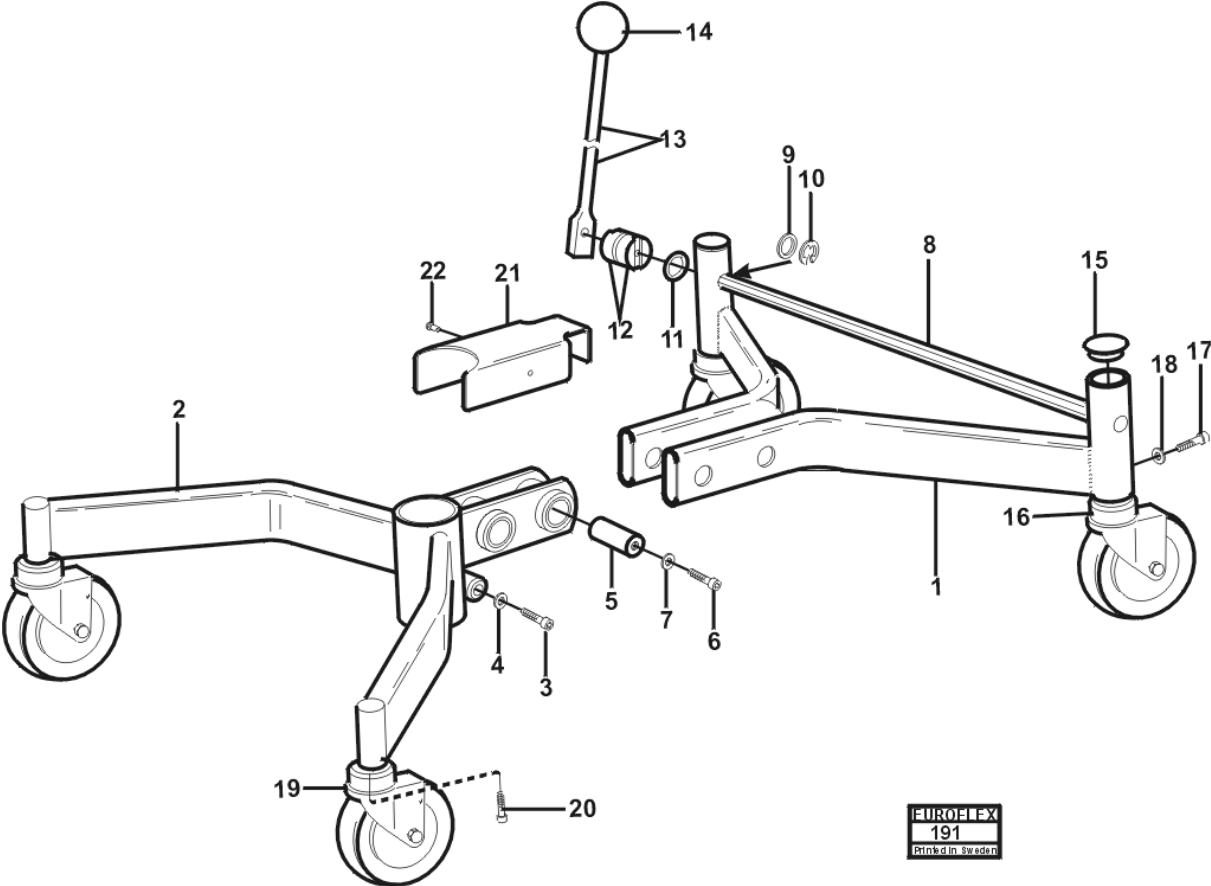

Eurovema AB  
Baldersvägen 38  
332 36 Gislaved  
Tel: 0371-39 01 00 Fax. 0371-189 82



**RESERVDELSLISTA**

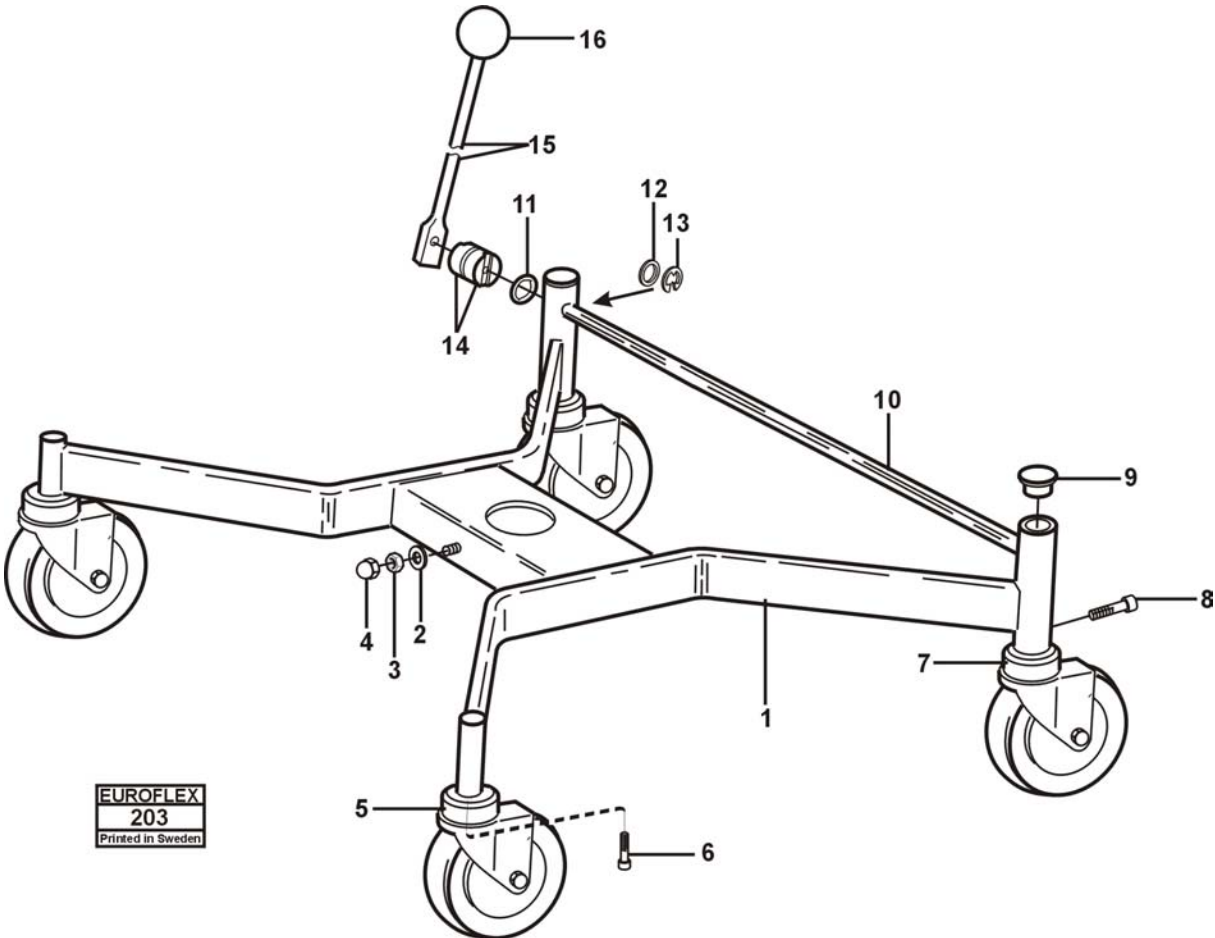

**EUROFLEX**  
**203**  
Printed in Sweden

**Eurovema AB**  
**Baldersvägen 38**  
**332 36 Gislaved**  
**Tel: 0371-39 01 00 Fax. 0371-189 82**

