


# Så här fungerar din nya rollator

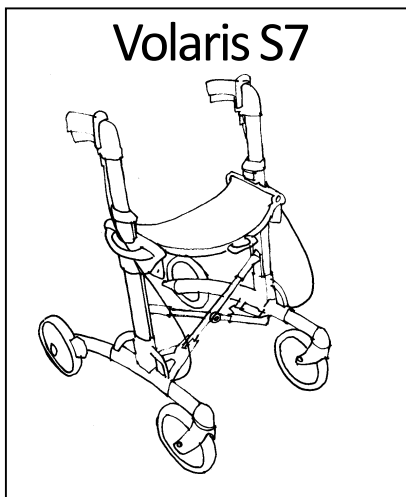

**VOLARIS**  
SWEDEN AB


# Grattis till din nya rollator!

Volaris S7 kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig att noga läsa igenom den här bruksanvisningen. Rätt användning och skötsel ger dig mera nytta, ökad säkerhet och en längre livslängd för din S7.

S7 ger ett bra stöd vid förflyttning och ska bara användas som ett gångstöd. Sitsen är garanterad att hålla för en vikt upp till 140 kg. Storleken på S7, utfälld och hopfäld, kan du se nedan. Du kan utrusta din S7 med flera olika tillbehör för din säkerhet och komfort.


## Innehåll

Montering av handtagen	sid 3
Justering av handtagen	sid 4
Justering av sitsen	sid 4
Att fälla ut S7	sid 5
Att fälla ihop	sid 5
Så här bromsar du	sid 6
Justera bromsen	sid 7
Körtips	sid 8
Underhåll	sid 10
Felsökning	sid 11
Tillbehör för din säkerhet	sid 12
Tillbehör för din komfort	sid 13
Garanti	sid 14

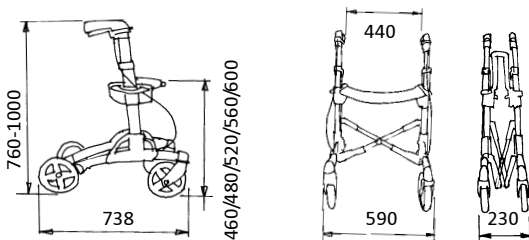


## Montera handtagen

Vi levererar normalt S7 med handtagen lösa vid direktleverans till brukaren för att förpackningen ska ta mindre plats vid transporten. Har du fått din S7 från en hjälpmedelscentral är handtagen redan monterade.

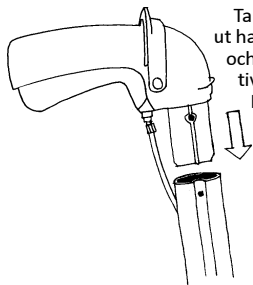


Ta ut S7 ur sin kartong. Ta ut handtagen ur påsen och sätt dem i respektive rör enligt skissen. Handtaget skall peka bakåt. Kontrollera att bromsvajern kommer på utsidan.

Skruva in skruvarna enligt skissen.

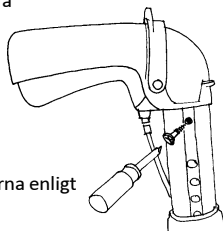

## Justera höjden på handtagen

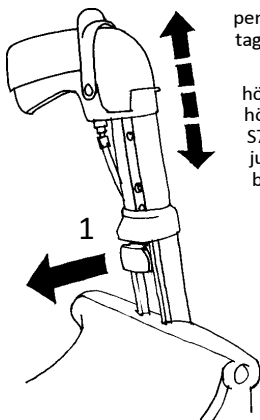

Genom att dra ut den orangea knappen (1) kan du ändra höjden på handtagen mellan 100 cm och 76 cm.

Ställ dig upprätt nära S7. Handtagshöjden är rätt när händerna är i jämnhöjd med handtagen. Efter att ha använt S7 ett tag känner du själv om du vill justera ytterligare. Det ska kännas bekvämt när du går med din S7.


## Justera höjden på sitsen


Ändra en sida i taget.

Dra ut den orangea knappen under sitsen. Lyft samtidigt upp eller tryck ner sitsen till önskad höjd. Känn efter att knappen klickar tillbaka så att sitsen är låst.

Gör om samma sak på den andra sidan.



Det är noga att sitsen är plan innan rollatorn används. Tryck ner mittenplattan på sitsen.

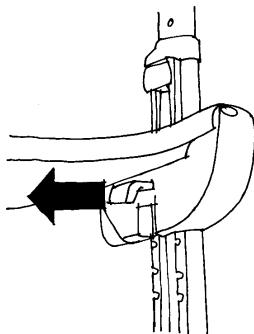

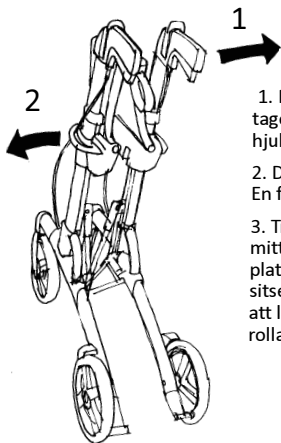

## Att fälla ut din S7


1. Fatta med en hand i det ena körhandtaget och luta S7 lätt åt samma håll så att hjulet lyfter några centimeter.
2. Dra utåt i lyfthandtaget på andra sidan. En fjäder hjälper till att fälla ut S7.
3. Tryck ner mittenplattan på sitsen för att låsa rollatorn.

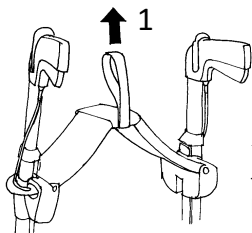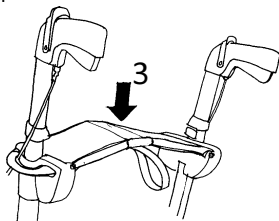


## Att fälla ihop S7

Ta bort en eventuell korg

1. Lyft i det orangea bandet.
2. Tryck ihop S7 med handtagen på sidan.

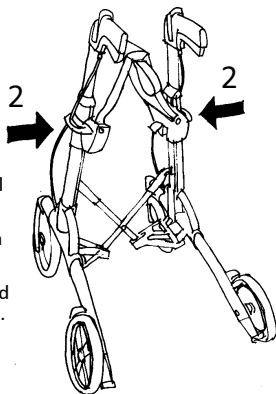


Så här bromsar du säkert

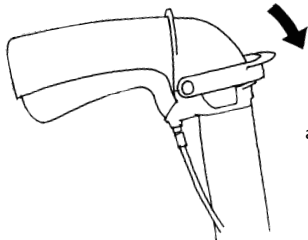


## Parkeringsbromsen

Parkeringsbromsen aktiveras genom att den orangea spaken fälls framåt och låses med ett klick.

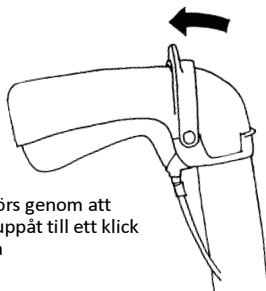

Bromsen frigörs genom att spaken fälls rakt uppåt till ett klick hörs. Se skisserna

## Färdbromsen

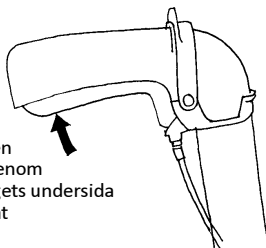

Bromsen aktiveras genom att handtagets undersida trycks uppåt

## Justera bromsen för rätt funktion

Bromseffekten kan justeras genom att ändra vajerlängden.



1. Fäll upp parkeringsbromsen.

2. Lossa låsmuttern enligt skissen.

3. Skruva ut justeringskruven om du vill öka bromseffekten. Skruva in justeringskruven om du vill minska bromseffekten.

4. Kontrollera avståndet mellan bromsbacken och hjulet. Avståndet skall vara ca 2 mm. Om du justerar bromsen alltför hårt blir parkeringsbromsen onödigt trög att sätta.


5. Dra åt låsmuttern igen.

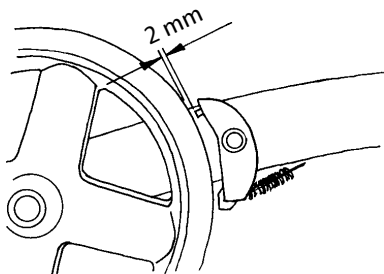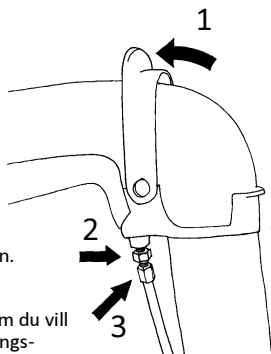

## Körtips

S7 är byggd med ett "Comfortchassie" som gör att den mjukt går över ojämnheter i vägen. När du behöver komma över ett större hinder eller komma upp på en trottoarkant kan du få hjälp av Tiphjälpen som sitter vid bakhjulen.

Tryck ner den ena trampan samtidigt som du lyfter i handtagen.

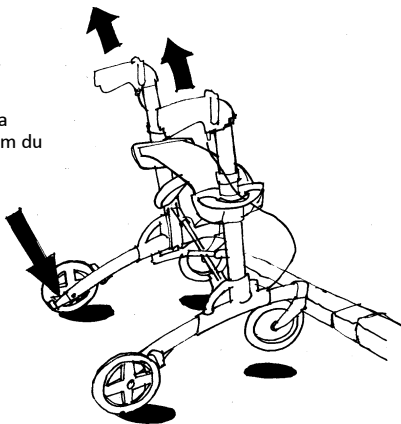


**Lyft inte i sitsen när du vill gå  
över ett hinder!  
Då fälls rollatorn ihop!**



## Lär dig "Saxtekniken".

Kör snett fram mot hindret. Bromsa den ena sidan. Luta S7 något bakåt så att framhjulen lyfts, sväng upp framhjulen över hindret. Det går fort när du har lärt dig det!

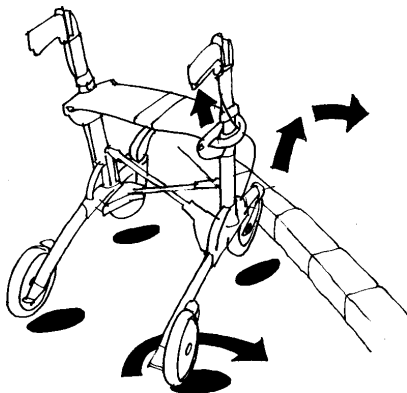

### För din säkerhet!

Innan du sätter dig på S7,  
lägg i parkeringsbromsen!


Kör aldrig med någon sittande  
på rollatorns sits!

## Underhåll

Du tjänar på att sköta din S7 väl. Då håller den längre.

## Rengöring

Torka av smuts med en våt trasa och ett mildt rengöringsmedel.

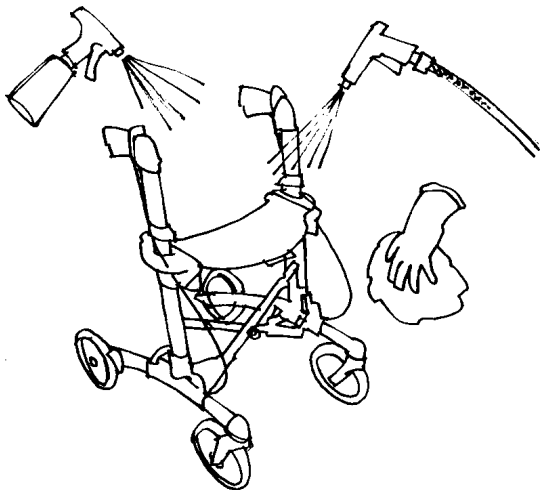


Var noga med att inte smuts samlas mellan hjulen och bromsbackarna, bromseffekten kan äventyras!

Det går bra att spola av S7 med en högttryckstvätt eller trädgårds-slang, om du spolar uppifrån. Torka torrt efteråt.

## Smörj vajern

Efter tvätten, smörj bromsvajern uppe vid handtaget och nere vid bakhjulet. Lyft upp färdbröms-handtaget och applicera några droppar olja på vajern som syns ovanför justeringsskruven. Smörj också vajern inne i fjädern vid bakhjulet.

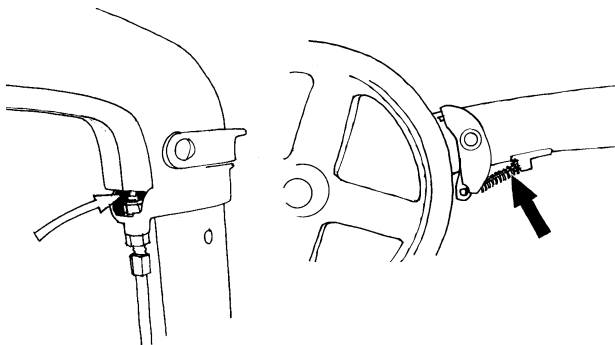

## Felsökning

Om S7 vid gång drar åt den ena sidan, kontrollera att hjulen snurrar lika lätt och att hjulgafflarna svänger lätt. Kontrollera att hjul och gafflar sitter fast ordentligt. Kontrollera att inte smuts eller skräp fastnat mellan hjul och bromsback.

### **Om bromsen inte tar eller tar olika**

Se till att bromsvajern är fäst i handtag och bromsarm. Kontrollera att fjädern vid bromsarmen är hel.



Kontrollera att bromsbacken vid bromsning trycker på hjulet, lika på båda sidor.

Justera vajern, se sidan 7.

## Tillbehör för din säkerhet


### Släpbroms

En broms med justerbar, kontinuerlig friktion. Kan monteras i efterhand.

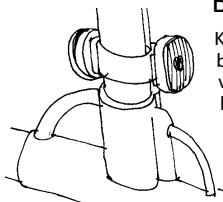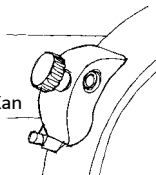


### Belysning

Kläms fast på stativet. Rött ljus bakåt, vitt ljus framåt. Batteridrivnen. Lätt att ta bort, lätt att byta batteri.

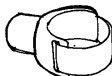

### Käpphållare

Två delar som skruvas fast på avsedd plats. Håller stadigt käpp, krycka eller dropställning på plats

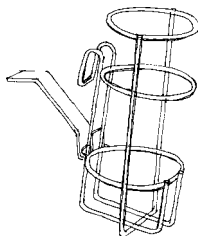


### Hållare för syrgasflaska


Kraftig stålkorg som hakas på sitsen samt ett medföljande fäste. Lätt att ta bort.

### Ryggband

Kraftigt stöd för ryggen som ger en säkrare känsla. Fästs med två bultar i befintliga fästen.

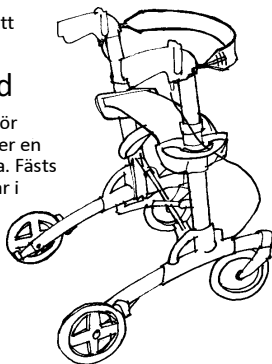

## Tillbehör för din komfort

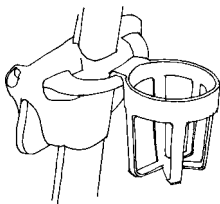


### Flaskhållare

Hållare i kraftig plast för flaska. Rymmer 0.5-liters burkar och flaskor. Hängs på handtaget.


### Anatomiskt handtag

Handtag för anatomiskt stöd av handen. Fördelar trycket mot handflatan. Monteras ovanpå de befintliga handtagen.

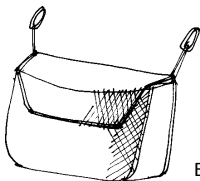

### Tygväska

En mjuk tygväska i vävd nylon som kan sitta på även då rollatorn fälls. Lätt att ta bort. Kan tvättas.

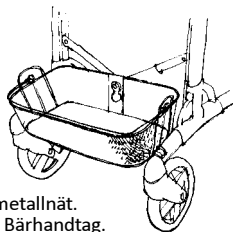


### Nätkorg

En stadig korg i metallnät. Hakas lätt på S7. Bärhandtag.




### Parasoll

Skyddar mot sol och regn. Kläms fast på stativet. Vridbar i alla riktningar.

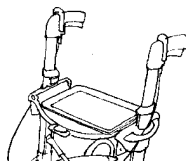

### Bricka

Bricka i vitt, som sätts över rollatorns sits.

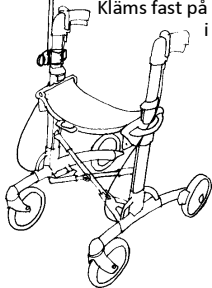

## Garanti

Volaris lämnar två års garanti på S7. Garantin omfattar inte förslitningsdelar som handtag, vajer och hjul. Vidare gäller inte garantin om rollatorn utsätts för onormal behandling eller specialanpassas utan vår medverkan.

## Tillverkad i Sverige

S7 är utvecklad och tillverkad i Sverige för att vi ska kunna garantera funktion och kvalitet och tillverkad av utvalda material och komponenter. S7 är återvinningsbar till 95%.

S7 uppfyller alla på marknaden gällande standard: SS-EN 1441, SS-EN 1985, SS-EN 12182 samt ISO 11199-2:2005 och är godkänd av Hjælpemiddelinstittuet, Danmark.



# Volaris Sweden AB

Brostigen 4, 334 33 Anderstorp

Telefon 0371-189 90 Fax 0371-189 82

E-mail: [info@volaris.se](mailto:info@volaris.se) Internet: [www.volaris.se](http://www.volaris.se)

Artnr # 81 104 01-02 080401