

# MONTERINGS – BRUKSANVISNING

## Armstödsstolpar

Art.nr. 624001-4010 std

Art.nr. 624101-4140 extra lång

Art.nr. 634001-4010 barn


Art.nr. 624001-4030 för slingbackrygg



På armstödsstolparna monteras armstödsplattorna. Stolparna monteras sen i armstödsfästet vid sitsen. Används för att justera armstöden i höjd.



Lossa på vredet och justera armstödet i höjd. Drag åt vredet.

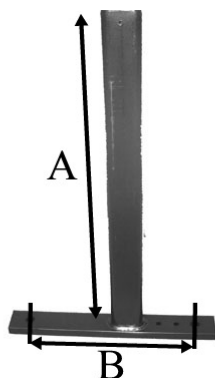

A= längden på stolpen

B= avståndet mellan hålen.

624001-4010, A=35cm B=19cm

624001-4140, A=50cm B=19cm

634001-4030, A=28cm B=12cm