


MONTERINGS – BRUKSANVISNING

Nackstöd – Comfort

Art.nr. 299001-4700

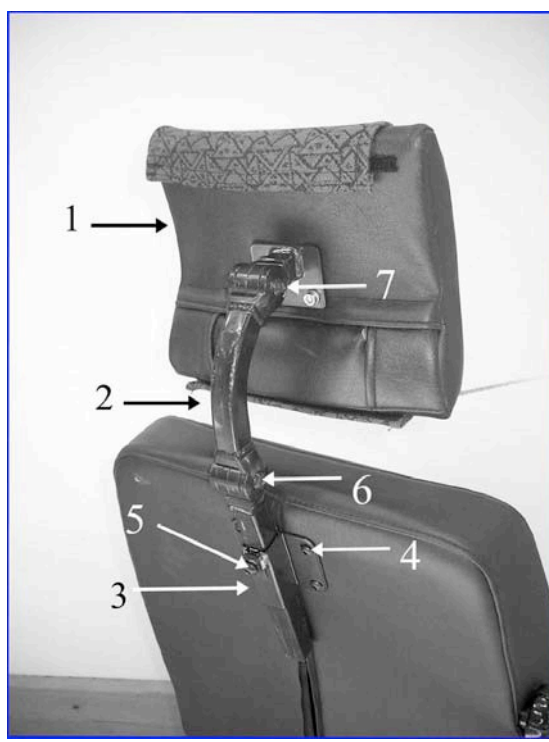

Nackstödsfästet (3) monteras med 4st M6 bult (4) i de förmonterade gänghålen, som sitter högst upp i mitten på ryggen bakom ryggöverdraget. Gör hål i ryggöverdraget, mitt för de gängade hålen, med ett vasst föremål, t.ex. en stjärnskruvmejsel.

Montera nackstödshållaren (2) med nackstöd (1) i nackstödsfästet (3).

För att justera höjd, vinkel och djup på nackstödet lossas skruvarna 5,6 och 7! När önskad inställning erhållits så drag åt skruvarna ordentligt. Verktyg: insexnyckel 5 mm.