

Rekonditioneringsanvisning för Arbetsstolar

Eurovemas stolar är tänkta att återanvändas under sin förväntade livslängd.

Rengöring

Använd ej högtryckstvätt spola ej heller med vatten eller andra vätskor!

Rengör chassi med mildt rengöringsmedel Ph 7-12 tex. tvållösning.

Klädsel på stoppade detaljer kan med fördel rengöras med klädseltvätt.

Överdragsklädsel kan maskintvättas i 60 grader.

Underrede och hjul

- Alla hjul har kontakt med golv och vinkelräta.
- Hjulskruvarna åtdragna och gänglimmade.
- Hjulen rullar fritt och svänger lätt.
- Smörj lager med tunnflytande olja.
- Test av bromsmekanismen. Smorda vajrar.

Manuella & elektriska lyftställdon

- Sitter fast ordentligt och roterar ej. Infettad med tunn olja.
- Ljudnivå låg / inga rasslande missljud.
- Lyfter hela vägen ända upp med brukaren i.
- Kontrollera att ställdon är åtdraget vid infästningen till chassit med 35 Nm.

Batterier och elektronik

- Batterierna sitter fast.
- Alla kablar är hela och ej kommer i kläm.
- Test av batteri och laddare. Ladda batterier fullt.
- Kontroll av manöverdosa/handkontroll.
- Tidmätare och huvudbrytare kontroll. Rätt styrka på säkring.

Sitssystem

- Rätt sitssystem och kombination. Glappar ej någonstans
- Hål för sele och bälte finns och är fria.
- Klädsel: Ren, tvättlappen fastsydd på överdrag. Sömmarna hela, ej skadade.
- Sitsvinkling och ryggstöd: funktionstest.
- El ställdon ger ej efter under tryck.
- Rattar och vred: infettade, lättjusterade och släta knoppar.

Tillbehör

- Infettade, lätt att justera, inga repor uppstår vid justering
- Funktionskontroll.

Slutkontroll

- All extra utrustning: passar in och är lättjusterade.
 - Varningsetiketter påklitrade. CE-märkt med serienummer.
 - Testkörning (alla funktioner testas i ändläge och rullstolen testas med maximal belastning)
 - Bruksanvisningen finns och följer med produkten.
 - Mer information i servicehandboken
-

Stol modell: _____

Serienummer: _____

Service gjord av:

Namn: _____

Datum: _____

Signatur: _____

Destruktionsanvisningar

Produkt som tas ur bruk permanent ska demonteras och källsorteras. Vid demontering iakttages försiktighet då det finns risk att klämskador kan uppstå. Demontering får endast utföras av auktoriserad tekniker.

Metall	Elektronik	Brännbart
Armstödsmekanism	Huvudenhet	Armstödsdynor
Ryggmekanism	Manöverkontakter	Sitsar
Gasfjäder	Kablar	Ryggar
Elställdon	Handkontroll	Övriga stoppdetaljer
Sittkryss		Hjul utan metallgaffel
Chassi		Övriga plastdetaljer
Benstöd		
Nackstödsmekanism		
Övriga metalledar		

Batterier som är förbrukade ska lämnas på miljöstation.

2022-01-20