

## Rengöring och skötsel

- När enheten används ska madrass och slangar rengöras med en fuktig duk en gång i veckan. Ett mildt i handeln förekommande rengörings- och desinfektionsmedel kan användas.

Använd inga aldehydhaltiga medel!

- Vid byte av patient måste madrassen desinficeras genom ett validerat och godkänt förfarande (i Tyskland ett förfarande godkänt av Robert Koch-institutet). Vid återanvändning av antidecubitussystem för tryckavlastning måste man beakta lagen om medicintekniska produkter samt riktlinjer för återanvändning av medicintekniska produkter och riktlinjer för sjukhus-hygien och förebyggande av infektioner (riktlinjer från Robert Koch-institutet finns på tyska och engelska).
- Överdraget i polyuretan kan tvättas i temperaturer upp till 90°C och behandlas med någon termisk process (t.ex. tvättförfarande med Ottalin Peracet). Också ångsterilisering kan genomföras, under förutsättning att man inte överskrider 75°C. Om arsos<sup>®</sup> basic/light/plus-madrassen är försedd med en pump för växeltryck, ska den torkas av med en fuktig trasa och såpvatten eller med ett mildt rengöringsmedel fritt från aldehyder.
- Man kan också göra en avtorkningsdesinfektion, om man tar hänsyn till verkningspektrum och verknings-tid.

Rekommenderade desinfektionsmedel:

BACILLOCID RASANT (BODE), BACILLOL AF (BODE), BACILLOCID SPEZIAL (BODE), KOHRSOLIN FF (BODE), KOHRSOLIN (BODE), MICROBAC FORTE (BODE), DISMOZON PUR (BODE), INCIDIN FOAM (ECOLAB), INDUR DES (ECOLAB).

Kontrollera med tillverkaren att desinfektionsmedlet inte angriper plastytor (polyuretan, polyamid, ABS-plaster, PVC). Strömförande delar i enheten får inte utsättas för väta (trasor ska vara fuktiga, inte våta). Se till att ingen fukt finns kvar i systemet innan det ställs undan för förvaring. Gör alltid en funktionskontroll innan systemet används på nytt. Kontrollera regelbundet att rengöringsförfarandena är verk-samma.